

Peristeen® Plus

Der Temperaturindikator wurde vom Wasserbeutel entfernt, da noch Verbesserungen dieser Funktion erforderlich sind. Das Wasser für die Irrigation sollte lauwarm sein (34-40°C); zu heißes Wasser kann die empfindliche Darmschleimhaut schädigen, zu kaltes Wasser kann zu Bauchkrämpfen führen.

Um zu fühlen, ob die Wassertemperatur lauwarm ist, lassen Sie das Wasser über ihr Handgelenk laufen.

23327630 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S.

Alle Rechte vorbehalten. © 2021-04-29



Coloplast