

Mike

Die Passform macht den Unterschied


zwischen unerwarteten Versorgungswechseln und einem planbaren Alltag.

Die Basisplatte richtig anbringen und entfernen.

Es gilt eine Menge neuer und komplexer Informationen zu verarbeiten, wenn man den Alltag mit einer chronischen Erkrankung wieder aufnimmt. Direkt nach der Stomaanlage benötigen Patienten viel Zeit, um sich in der neuen Situation zurechtzufinden und sind möglicherweise noch nicht in der Lage, Informationen zu verarbeiten. Diese emotionale Herausforderung kann die Fähigkeit der Patienten beeinträchtigen, eine effektive Routine für den Versorgungswechsel zu etablieren und aufrechtzuerhalten.



50 % der Patienten mit chronischen Erkrankungen halten sich nicht an ihre verordnete Behandlung.¹

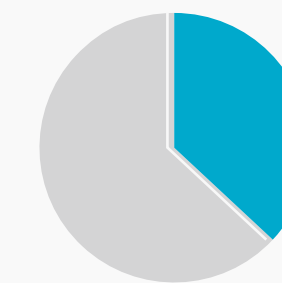

37 % der Stomapatienten bringen ihre Versorgung nicht richtig an.²

Die Nichteinhaltung der Vorgaben hat **klinische Konsequenzen** für den Patienten und seine **Lebensqualität**. Zudem sind die wirtschaftlichen Folgen **von weitreichender Bedeutung**.³

Warum ist die richtige Produktapplikation so wichtig?

Schwierigkeiten beim Anbringen und Entfernen können sich auf die Compliance des Patienten auswirken und damit das Risiko von Leckagen und damit verbundenen Hautirritationen erhöhen.^{4,5}



*»Ich fühle mich wieder wie ich selbst.
Ich kann zu 100 % ich sein und alles tun,
was ich früher auch getan habe.«*

Deirdre hat ein Ileostoma

Vorteile einer erhöhten Patientencompliance



Verbesserte Lebensqualität für die Anwender

Leckagen und Hautprobleme können einen negativen Einfluss auf die Lebensqualität der Patienten haben.⁶



Einsparung von Zeit und Ressourcen für medizinische Fachkräfte

Das Pflegepersonal berichtet, dass 7 von 10 der Patientenbesuche wegen Leckagen oder Hautproblemen erfolgen.⁷



Geringere Belastung des Gesundheitssystems

Peristomale Hautkomplikationen können die stomabedingten Behandlungskosten pro Patient um 22 % erhöhen, von durchschnittlich 215 € auf 268 € in einem Zeitraum von 7 Wochen.⁸

»SenSura® Mio ist perfekt für mich, weil ich seit der Operation Narbengewebe habe. Das Produkt passt sich so gut an, dass ich mir keine Sorgen über Leckagen machen muss.«

Deirdre hat ein Ileostoma



Herausforderung Nr. 3 bei der Passform

Anbringen und Entfernen der Versorgung

SenSura® Mio mit BodyFit Technologie® passt sich an die peristomale Körperform Ihres Patienten an.

Der spezielle Aufbau des einzigartigen elastischen Hautschutzes von SenSura® Mio sorgt dafür, dass er **schnell auf der Haut haftet** und sich **dabei Falten und Unebenheiten anpasst**.

Dies erleichtert **die Anbringung** und hilft, **Faltenbildung zu vermeiden**, was wiederum das Risiko von Leckagen und Hautproblemen reduziert.

Die ausgewogene Zusammensetzung der Hautschutzplatte sorgt dafür, dass der Hautschutz sicher an Ort und Stelle bleibt und dennoch **vom Anwender leicht entfernt** werden kann, ohne die Haut zu reizen oder zu schädigen.

1 Adherence to Long-term Therapies: Evidence for Action. Weltgesundheitsorganisation, Genf, 2003. 2 Herlufsen, P. et al. 2006. Study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas. British Journal of Nursing, 15 (16): 854–862. 3 Jin, J. et al. 2008. Factors affecting therapeutic compliance: A review from the patient's perspective. Ther Clin Risk Manag, 4 (1): 269–286. 4 Meisner, S. & Balleby L. 2008. Peristomal Skin Complications. Seminars in Coloi & Rectal Surgery, 19: 146–150. 5 Voergaard, L. L. et al. 2007. Ostomy bag management: comparative study of a new one-piece closed bag. British Journal of Nursing, 16 (2): 6 Davis, J. et al. 2011. Factors impairing quality of life for people with an ostomy. Gastrointestinal nursing, 9 (2): 14–18. 7 Ostomy Life Study 2019 für ein besseres Verständnis von Leckagen und Hautirritationen und deren Wahrnehmung durch Fachkräfte. Anwenderbefragung, n=327 Fachkräfte. Coloplast. Data on file. PM-11947. Die Ergebnisse stammen aus Untersuchungen, die von Coloplast nicht veröffentlicht wurden. 8 Meisner et al. 2012. Peristomal Skin Complications Are Common, Expensive, and Difficult to Manage: A Population Based Cost Modeling Study. PLoS ONE, 7 (5), p. e. 37813. (Über einen Zeitraum von 7 Wochen). 9 Ostomy Life Study 2016 für ein besseres Verständnis vom Alltag von Stomaträgern weltweit, bezogen auf Demographie, Lebensqualität, Produktverwendung Physische und Mentale Gesundheit, Versorgung. Anwenderbefragung, n=4235. Coloplast. Data on file. PM-04559. Die Ergebnisse stammen aus Untersuchungen, die von Coloplast nicht veröffentlicht wurden. 10 Untersuchung und Bewertung der »Anbringen-Entfernen-Kontrollieren-Routine in Indien, 2014. Anwenderbefragung, n=116. Coloplast. Data on file. PM-03274. Die Ergebnisse stammen aus Untersuchungen, die von Coloplast nicht veröffentlicht wurden.

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

PM-15896

Coloplast GmbH, Postfach 70 03 40, 22003 Hamburg, Tel. 040 669807-77, Fax 040 669807-48, service@coloplast.com
www.coloplast.de The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2021-03. All rights reserved Coloplast A/S

