

Produktübersicht Wundversorgung

Stand: Januar 2025



Weniger Tage mit Wunden.



Inhaltsverzeichnis

- 4 Das Wund-Dreieck**
- 5 Der Coloplast Wundberg**
- 6 Schaumverbände**
 - Die 3DFit® Technologie
 - Biatain®
 - Biatain® Silicone
 - Biatain® Silicone Non-Border
 - Biatain® Silicone Lite
- 16 Schaumverbände mit Silber**
 - Biatain® Ag
 - Biatain® Silicone Ag
- 20 Schaumverbände mit Ibuprofen**
 - Biatain® Ibu
- 22 Hydrokolloide**
 - Comfeel® Plus Flexibel
 - Comfeel® Plus Transparent
- 26 Superabsorber**
 - Biatain® Superabsorber
 - Biatain® Super
- 30 Faserverbände**
 - Biatain® Fiber
- 32 Alginate/Alginate mit Silber**
 - Biatain® Alginate
 - Biatain® Alginate Ag
- 36 Wundkontaktauflagen**
 - Biatain® Contact
- 38 Hautfaltenversorgung**
 - InterDry®
- 40 Wundspülung/Hautpflege**
 - Allrinse®
 - Purilon®
- 44 Bestellinformationen**
- 53 Lokale Therapie in der Wundversorgung**
- 54 Coloplast® Professional**

Das Coloplast Wund-Dreieck – ein intuitives Konzept zur einfachen Wundbeurteilung.

Coloplast hat weltweit viele Fachkräfte danach befragt, welche Faktoren neben den ganzheitlichen Aspekten der Wundursache und den Patientenbedürfnissen bei der lokalen Wundbeurteilung am wichtigsten sind.

Die Antwort war eindeutig: **Wundgrund, Wundrand und Wundumgebung.**
Denn alle drei Punkte tragen entscheidend zur Wundheilung bei.



Wundgrund

Klinisch relevantes Ziel im Wundgrund ist die Abwesenheit von Infektion, ein optimal feuchtes Wundmilieu und die Bildung von Granulationsgewebe. Der Wundberg zeigt je nach Wundstadium phasengerechte Handlungsoptionen auf.


Wundrand

Der Wundrand sollte vor Störfaktoren, wie z. B. Mazeration und Nekrosen, geschützt werden. Biatain® Schaumverbände schützen den Wundrand durch eine exzellente Absorption und ihre Wölbung zum Wundgrund.

Wundumgebung

Bei der wundumgebenden Haut wird eine gesunde, von Mazeration und Irritation freie Haut angestrebt. Auch trockene Haut und Hyperkeratosen sollten erfasst und behandelt werden. Ein wichtiger Faktor zum Schutz der wundumgebenden Haut ist die Auswahl eines Verbands mit geeigneter Haftung. Die Biatain® Schaumverbände bieten daher für jeden Hauttyp geeignete Haftarten.

Der Coloplast Wundberg

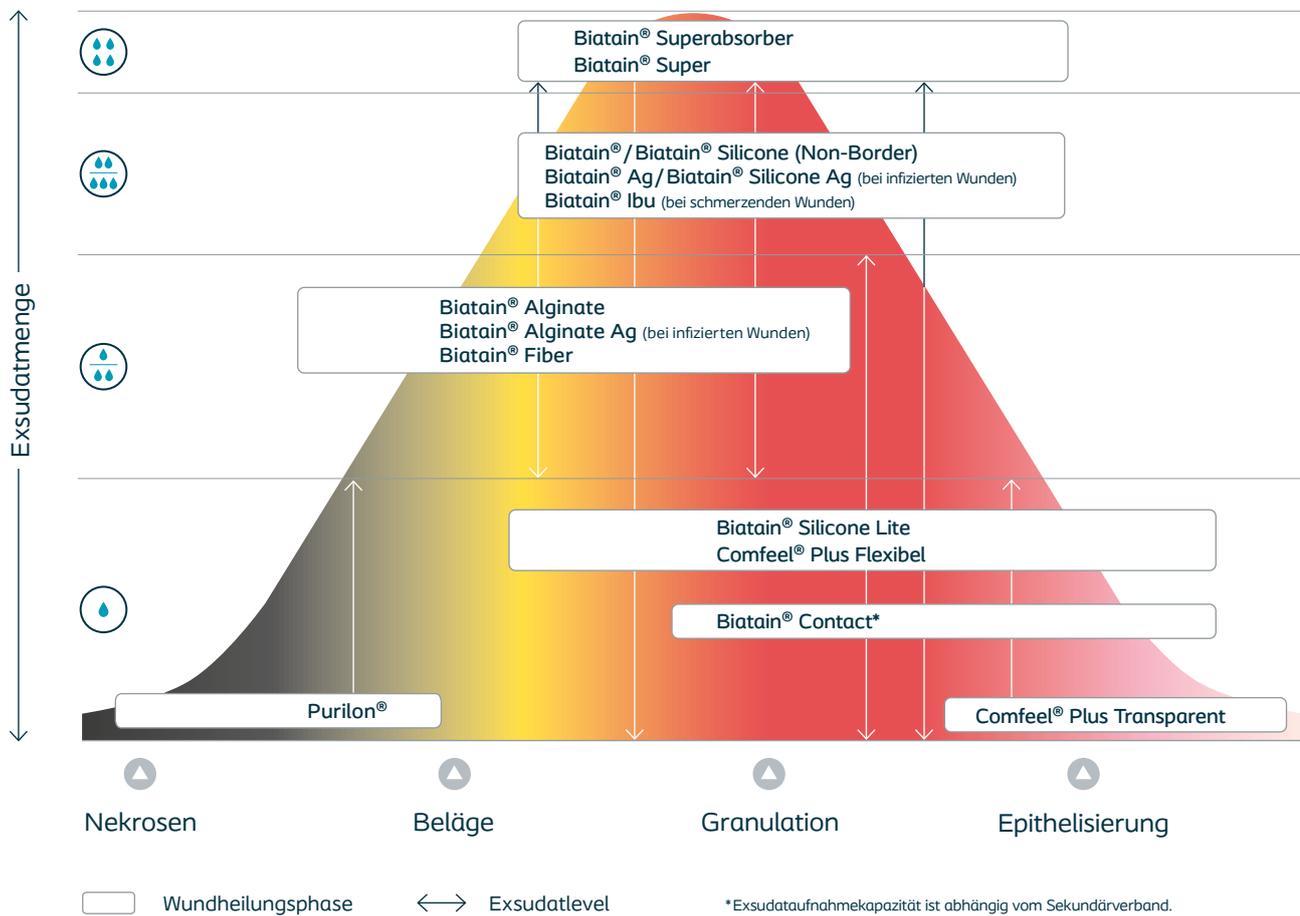

Gemäß den Eckpunkten des Wund-Dreiecks sind die Beurteilung des Wundgrundes sowie die daraus abgeleiteten Behandlungsoptionen wichtige Bestandteile des lokalen Wundmanagements.

Bei der Verbandauswahl sollten sowohl die Menge des austretenden Exsudates als auch die Wundheilungsphase berücksichtigt werden. Zusätzlich sollten bei hoher bakterieller Belastung und auftretendem Wundschmerz entsprechende topische und/oder systemische Therapien eingeleitet werden.

Der Coloplast Wundberg bietet eine Orientierungshilfe zu den Einsatzgebieten der einzelnen Verbände.

Exsudatmenge

- leicht
- leicht – mittel
- leicht – stark
- mittel – stark
- sehr stark

Eigenschaften

- Antimikrobiell
- Zuschneidbar
- Nicht-Zuschneidbar
- Wasserfest
- Fixierung notwendig
- Sekundärverband notwendig

Biatain[®] Schaumverbände

Mit einzigartiger 3DFit[®] Technologie

Passt. Einfach. Perfekt.

Durch die 3DFit[®] Technologie wölben sich Biatain[®] Schaumverbände zum Wundgrund, stellen einen direkten Kontakt her, verhindern eine Exsudatansammlung und sorgen so für ein optimales Wundheilungsmilieu.




Wölbung zum
Wundgrund



Vertikale
Absorption



Hohes Rück-
haltevermögen

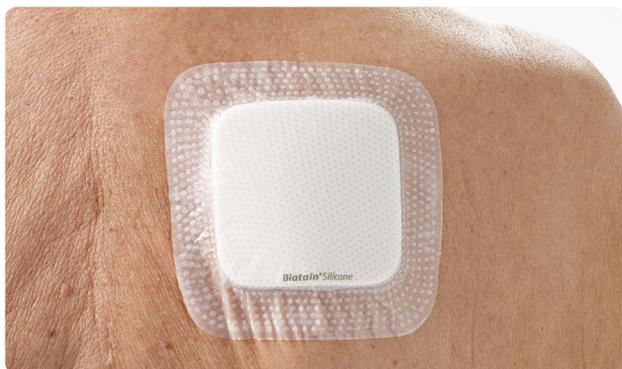

Biatain® Silicone Schaumverband

- › für alle Hauttypen
- › auch für brüchige Alters- und vorgeschädigte Umgebungshaut
- › sicherer Halt dank perforiertem Silikon-Distanzgitter über der gesamten Verbandfläche
- › schmerzarter Verbandwechsel



Biatain® Silicone Non-Border Schaumverband

- › für alle Hauttypen, auch für Wunden mit brüchiger, fragiler wundumgebender Haut
 - › hautfreundlich und sanft haftend
 - › wie eine 3. Hand beim Verbandwechsel
- Eigenschaften gelten auch für Biatain® sanft-haftend



Biatain® Schaumverband selbst-haftend

- › für die Behandlung von Wunden mit intakter wundumgebender Haut
- › sicheres Fixieren dank Haftrand auf Hydrokolloidbasis
- › kein ungewolltes Abrollen
- › bakterien- und wasserabweisender Topfilm



Biatain® Schaumverband nicht-haftend

- › für vorgeschädigte wundumgebende Haut und bei auftretenden Hautirritationen
- › abgeflachte Ränder verringern das Auftreten von Druckstellen

Biatain® Haftarten

	 selbst-haftend (Silikon)	 sanft-haftend (Silikon)	 selbst-haftend (Hydrokolloid)	 nicht-haftend
Hauttyp				
Normale Haut	✓	✓	✓	✓
Leicht geschädigte Haut	✓	✓	✓	✓
Stark geschädigte Haut	✓	✓		✓
Fragile Haut	✓	✓		✓

Biatain®

Exzellente Absorption für optimale Wundheilung

Indikation

Biatain® Schaumverband ist für wenig bis stark exsudierende chronische und akute Wunden indiziert, wie beispielsweise:

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Nicht infiziertes diabetisches Fußsyndrom
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen
- › Brandwunden 2. Grades

Biatain® sanft-haftend und nicht-haftend sind für alle Hauttypen geeignet. Biatain® selbst-haftend eignet sich besonders für intakte Umgebungshaut.

Vorteile

- › Direkter Kontakt zum Wundgrund durch die 3DFit Technologie
- › Exzellentes Absorptions- und Rückhaltevermögen
- › Sicher auch unter Kompression

Schaum mit einzigartiger
3DFit Technologie



Eigenschaften | Exsudatmenge



Kurzbeschreibung

Der Biatain[®] Schaumverband wölbt sich aufgrund der einzigartigen 3DFit Technologie zum Wundgrund und stellt einen direkten Kontakt her. Durch die exzellente Absorption wird verhindert, dass sich Exsudat in der Wunde sammelt.

Die Kombination aus Wölbung zum Wundgrund, vertikaler Absorption und sehr gutem Rückhaltevermögen schützt vor Mazeration und Leckagen, auch unter Kompression. Auf der Außenseite des Verbands schützt eine semipermeable Polyurethanfolie vor Keimen und Feuchtigkeit.




Ulcus am Unterschenkel nach dem ersten Verbandwechsel. Exsudat wurde vom Verband vertikal aufgenommen.

Produktnutzen

- › Biatain[®] wölbt sich zum Wundgrund, stellt einen direkten Kontakt her und passt sich den Konturen der Wunde an. So wird der Wundrand geschützt und verhindert, dass sich Exsudat in der Wunde sammelt
- › Sehr gutes Rückhaltevermögen auch unter Kompression
- › Biatain[®] Schäume absorbieren vertikal, dies minimiert das Risiko von Mazeration und Leckagen
- › Schafft ein optimal feuchtes Wundheilungsmilieu
- › Biatain[®] Schäume sind besonders weich und flexibel für einen optimalen Tragekomfort
- › Lange Tragedauer von bis zu 7 Tagen
- › Einfache, wirtschaftliche Versorgung (Mögliche Ersparnis zusätzlicher Wundfüller)



Applikation Biatain[®] nicht-haftend 10 × 10 cm.

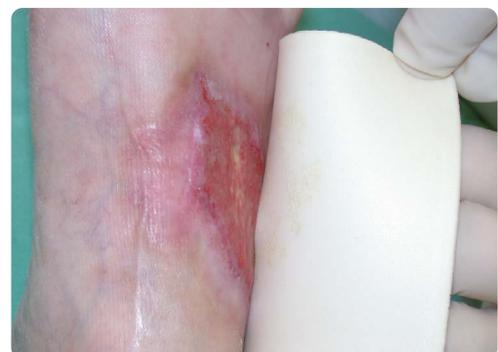

Nach einigen Tagen der Behandlung mit Biatain[®] ist eine Verkleinerung der Wunde und granulierendes Gewebe zu erkennen.



Biatain[®] Silicone

Für sanfte Haftung bei exsudierenden Wunden

Indikation

Biatain[®] Silicone ist eine vielseitige Lösung für ein breites Spektrum an mittel bis stark exsudierenden chronischen und akuten Wunden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Nicht infiziertes diabetisches Fußsyndrom
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen

Biatain[®] Silicone ist für alle Hauttypen geeignet, auch für brüchige und fragile Altershaut.

Vorteile

- › Wölbt sich zum Wundgrund, stellt einen direkten Kontakt her und reduziert die Exsudatansammlung
- › Absorbiert Wundexsudat sowie Keime
- › Hält 99,98 % der Keime im Schaumverband zurück (in vitro getestet)*
- › Reduziert das Infektionsrisiko

Topfilm

Bakterien- und wasserabweisend

Depot


mit Superabsorbent

Biatain[®] Schaum

Silikonhaftung

Sanft und sicher

Non-Touch-Technologie

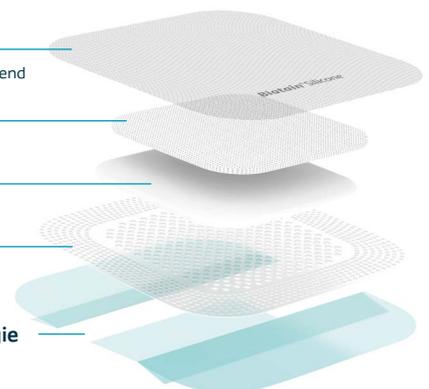



Kurzbeschreibung

Biatain[®] Silicone Schaumverband kombiniert die bewährte 3DFit Technologie des Biatain[®] Schaums mit einem zusätzlichen Superabsorber-Depot und einer sanften Silikonhaftung.

Die sanfte, perforierte Silikonhaftung befindet sich auf der gesamten Fläche des Verbands und bietet dadurch einen sicheren Halt, ohne mit der Wunde zu verkleben. Die Perforation ermöglicht eine hohe Absorption.

Der semipermeable, wasser- und bakterienabweisende Topfilm schützt die Wunde von außen und ist duschfest. Der Verband besitzt eine 3-teilige Applikationsfolie für eine einfache und aseptische Applikation.



Die sanfte Silikonhaftung sorgt für einen sicheren Halt und bietet einen hohen Tragekomfort.

Produktnutzen

- › Wölbt sich zum Wundgrund
- › Exsudat und Bakterien werden aufgenommen und 99,98 % der Keime im Schaumverband gebunden – auch unter Druck*
- › Es wird ein optimales Wundheilungsmilieu gefördert und das Infektionsrisiko reduziert
- › Der optimale Kontakt zum Wundgrund minimiert das Risiko, dass sich Exsudat in der Wunde sammelt
- › Absorbiert Wundexsudat vertikal und hält es sicher zurück. Risiko von Mazeration und Leckagen wird minimiert
- › Direkter Kontakt zum Wundbett stimuliert die Granulation
- › Lange Tragedauer von bis zu 7 Tagen und wirtschaftliche Versorgung durch möglichen Verzicht von zusätzlichen Wundfüllern



Biatain[®] Silicone wölbt sich dank der 3DFit Technologie zum Wundgrund und passt sich optimal den Konturen der Wunde an.



Biatain[®] Silicone hält 99,98 % der Keime im Schaumverband zurück (in vitro getestet).*



Biatain® Silicone Non-Border

Für sanfte Haftung bei exsudierenden Wunden

Indikation

Biatain® Silicone Non-Border ist eine vielseitige Lösung für ein breites Spektrum an wenig bis stark exsudierenden chronischen und akuten Wunden, wie z.B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Nicht infiziertes diabetisches Fußsyndrom
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Traumatische Wunden


Biatain® Silicone Non-Border ist für alle Hauttypen geeignet, auch für brüchige und fragile Altershaut.

Vorteile

- › Wölbt sich zum Wundgrund, stellt einen direkten Kontakt her und reduziert Exsudatansammlungen
- › Unter Kompression einsetzbar
- › Zuschneidbar, daher geeignet für schwer zu versorgende Körperregionen (bspw. Finger, Zehen, usw.)
- › »Dritte« Hand beim Verbandwechsel

Biatain® Schaum
mit 3DFit Technologie

Silikonhaftung
vollflächig, sanft

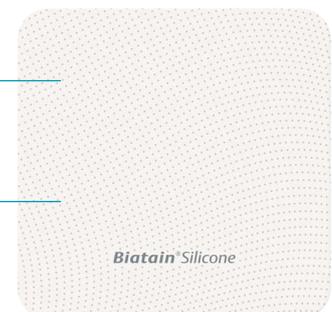



Kurzbeschreibung

Biatain[®] Silicone Non-Border Schaumverband kombiniert die bewährte 3DFit Technologie des Biatain[®] Schaums mit einer vollflächigen Silikonhaftung ohne Haftrand.

Die sanfte, perforierte Silikonhaftung befindet sich auf der gesamten Fläche des Verbands und bietet dadurch einen sicheren Halt, ohne mit der Wunde zu verkleben. Die Perforation ermöglicht außerdem eine exzellente Absorption. Der semipermeable, bakterienabweisende Topfilm schützt die Wunde von außen. Der Verband besitzt eine 3-teilige Applikationsfolie für eine einfache und aseptische Applikation.



3-teilige Non-Touch-Technologie zur einfachen und aseptischen Applikation.

Produktnutzen

- › Wölbt sich zum Wundgrund und stellt einen direkten Kontakt her, um Exsudatansammlungen zu reduzieren
- › Mit Kompressionstherapie kombinierbar, Exsudat wird vertikal absorbiert und sicher zurückgehalten
- › Wundrand wird geschützt und Mazerationen und Leckagen minimiert
- › Schafft ein optimal feuchtes Wundheilungsmilieu
- › Zuschneidbar, daher geeignet für schwer zu versorgende Körperregionen (z. B. Finger, Zehen, usw.)
- › Weich und anschmiegsam und daher geeignet für das Anbringen in Hautfalten
- › Sanfte, vollflächige Silikonhaftung dient als »dritte« Hand beim Verbandwechsel und erleichtert so die Applikation
- › Lange Tragedauer von bis zu 7 Tagen und wirtschaftliche Versorgung durch möglichen Verzicht von zusätzlichen Wundfüllern



Biatain[®] Silicone Non-Border ist zuschneidbar, daher ideal geeignet für schwer zu versorgende Körperregionen (z. B. Finger, Zehen, usw.).



Exsudat wird auch unter Kompression absorbiert und im Schaumverband zurückgehalten.

Biatain® Silicone Lite

Für sanfte Haftung bei schwach exsudierenden Wunden

Indikation


Biatain® Silicone Lite ist ein dünner und sehr flexibler Schaumverband für schwach bis mittelstark exsudierende chronische und akute Wunden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Nicht infiziertes diabetisches Fußsyndrom
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen

Biatain® Silicone Lite ist für alle Hauttypen geeignet, auch für brüchige und fragile Altershaut.

Vorteile

- › Vertikale Absorption für schwach bis mittelstark exsudierende Wunden
- › Sehr dünn und besonders flexibel
- › Kann helfen postoperative Blasenbildung zu verhindern

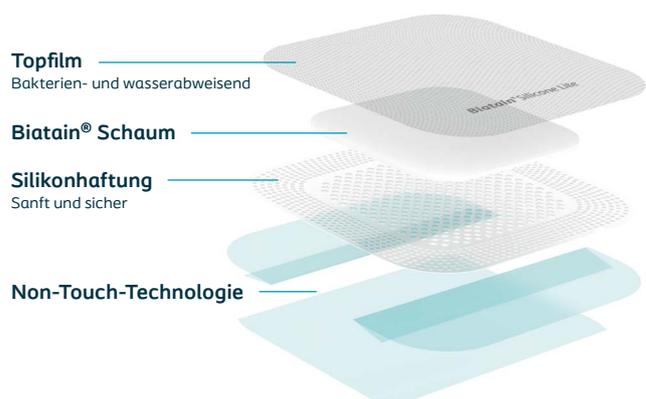



Kurzbeschreibung

Biatain[®] Silicone Lite ist ein besonders dünner, sehr flexibler und anpassungsfähiger Schaumverband mit 3DFit Technologie.

Die sanfte, perforierte Silikonhaftung befindet sich auf der gesamten Fläche des Verbands und bietet dadurch einen sicheren Halt, ohne mit der Wunde zu verkleben. Der Topfilm schützt die Wunde von außen und ist duschfest. Der Verband besitzt eine 3-teilige Applikationsfolie für eine einfache und aseptische Applikation.

Durch seine besondere Flexibilität eignet sich Biatain[®] Silicone Lite für eine Vielzahl an akuten und chronischen Wunden.



Der Verband ermöglicht durch seine besondere Flexibilität eine sichere Versorgung an schwer zu versorgenden Körperstellen.

Produktnutzen

- › Der Verband wölbt sich zum Wundgrund und passt sich den Konturen der Wunde an. So wird das Risiko von Mazeration und Leckagen minimiert
- › Absorptions- und Rückhaltevermögen auch unter Kompression
- › Die sanfte Silikonhaftung sorgt für einen sicheren Halt ohne mit der Wunde zu verkleben. Dies ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel
- › Aufgrund des semipermeablen, wasser- sowie bakterienabweisenden Topfilms wird dem Patienten das Duschen ermöglicht
- › Die 3-teilige Non-Touch-Technologie erleichtert eine einfache und aseptische Applikation
- › Lange Tragedauer von bis zu 7 Tagen



Biatain[®] Silicone Lite eignet sich auch für Akutwunden.



Vertikale Absorption für schwach bis mittelstark exsudierende Wunden.

Biatain® Ag

Für lokal infizierte Wunden

Indikation


Biatain® Ag ist für wenig bis stark exsudierende, bakteriell belastete chronische und akute Wunden indiziert, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Diabetische Fußulcera
- › Brandwunden 1. und 2. Grades
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen

Biatain® Ag nicht-haftend ist für alle Hauttypen geeignet. Biatain® Ag selbst-haftend eignet sich besonders bei intakter Umgebungshaut.

Vorteile

- › Wölbt sich zum Wundgrund
- › Wirkt lokal am Wundgrund
- › Antimikrobielle Wirksamkeit auch gegen MRSA, VRE, ESBL und Pseudomonas

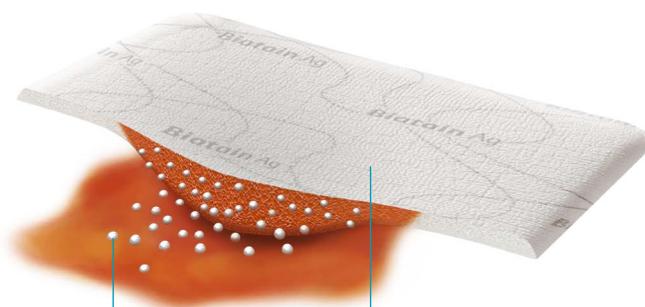

Silberwirkung
kontinuierlich

Biatain® Schaum
mit 3DFit Technologie und homogen
verteiltem ionischen Silber



Kurzbeschreibung

Biatain[®] Ag ist ein antimikrobieller Schaumverband mit 1,0 mg/cm² ionischem Silber, der ein optimales Wundheilungsmilieu schafft und erhält.

Biatain[®] Ag basiert auf dem bewährten Biatain[®] Schaum mit 3DFit Technologie. Er enthält zusätzlich homogen verteilte, antimikrobiell wirksame Silberkomplexe. Durch den Kontakt zum Wundbett werden die Silberionen, in Abhängigkeit vom aufgenommenen Exsudat, lokal am Wundgrund freigesetzt. So kann die Keimbelastung und die lokale Infektion dort behandelt werden, wo sie auftritt.



Dekubitus mit Wundheilungsstörung aufgrund bakterieller Belastung.



Keimreduzierung durch exzellentes Exsudatmanagement und effektive Silberwirkung.

Produktnutzen

- › Wölbt sich zum Wundgrund und minimiert so das Risiko von Mazeration und Leckagen
- › Exzellentes Absorptions- und Rückhaltevermögen auch unter Kompression
- › Schnellere Wundheilung durch antimikrobielle Wirksamkeit von bis zu 7 Tagen
- › Kosten- und Zeitersparnis durch verlängerte Verbandwechselintervalle
- › Wirkt auch gegen antibiotikaresistente Keime wie MRSA, VRE und ESBL
- › Tötet 99,99 % der reifen Biofilme*** (*P. aeruginosa*) und verhindert die Biofilmneubildung (in vitro getestet)



Wundversorgung mit Biatain[®] Ag.



Biatain® Silicone Ag

Für sanfte Haftung bei lokal infizierten Wunden

Indikation

Biatain® Silicone Ag ist für ein breites Spektrum an wenig bis stark exsudierenden chronischen und akuten Wunden mit verzögerter Heilung aufgrund von Bakterien oder für Wunden mit Infektionsrisiko indiziert, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Diabetische Fußulcera
- › Brandwunden 2. Grades
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen

Biatain® Silicone Ag ist für alle Hauttypen geeignet, auch für brüchige und fragile Altershaut.

Vorteile

- › Wirkt lokal am Wundgrund
- › Wirkt auch gegen MRSA, VRE, ESBL und Pseudomonas
- › Sichere und sanfte Haftung

Silikonhaftung
Sanft und sicher

Schaumkissen
mit 3DFit Technologie
und homogen verteiltem
ionischen Silber





Kurzbeschreibung

Biatain[®] Silicone Ag Schaumverband bietet dank der 3DFit Technologie eine hohe Absorption und Retention und stellt einen direkten Kontakt zum Wundgrund her, was eine lokale Silberwirkung ermöglicht.

Der Verband aktiviert bis zu 7 Tage kontinuierlich und kontrolliert ionisches Silber und wirkt so über die gesamte Tragedauer gegen die üblicherweise in infizierten, nicht heilenden Wunden vorkommenden Bakterien, auch gegen MRSA, VRE, ESBL und Pseudomonas.

Die perforierte, vollflächige Silikonhaftung bietet einen sicheren Halt, ohne mit der Wunde zu verkleben und ermöglicht eine hohe Absorption. Der semipermeable, wasser- sowie bakterienabweisende Topfilm schützt die Wunde von außen und ist duschfest.



Silberaktivierung über die gesamte Tragedauer von bis zu 7 Tagen.



3-teilige Non-Touch-Technologie zur einfachen und aseptischen Applikation.

Produktnutzen

- › Wölbt sich und ermöglicht so einen optimalen Kontakt zum Wundgrund. Dies minimiert das Risiko von Mazeration und Leckagen und schützt den Wundrand
- › Hohes Absorptions- und Rückhaltevermögen auch unter Kompression
- › Kann durch die 3DFit Technologie Kosten für einen Wundfüller sparen
- › Sehr gute Passform und ein optimales Tragegefühl, auch an schwer zu versorgenden Körperstellen
- › Sanfte Silikonhaftung sorgt für einen sicheren Halt und ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel
- › Silberaktivierung zur schnellen Abtötung von Bakterien
- › Tötet 99,99 % der reifen Biofilme* (P. aeruginosa) und verhindert die Biofilmneubildung (in vitro getestet)



Hohe Absorption und antimikrobielle Wirkung für bakteriell belastete/lokal infizierte Wunden.



Biatain® Ibu

Exzellente Absorption für schmerzhafte Wunden

Indikation


Biatain® Ibu Schaumverband für wenig bis stark exsudierende und durch Gewebeschädigung schmerzende Wunden, wie z.B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Nicht infiziertes diabetisches Fußsyndrom
- › Spalthautentnahmestellen (nur nicht-haftend)
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen
- › Brandwunden 2. Grades
- › Für Wunden, die keine tieferen Schichten als die Haut betreffen.

Biatain® Ibu sanft-haftend und Biatain® Ibu nicht-haftend sind für alle Hauttypen geeignet.

Vorteile

- › Exzellente Absorption auch unter Druck
- › Effektive lokale Wirkung
- › Schnelle Schmerzlinderung

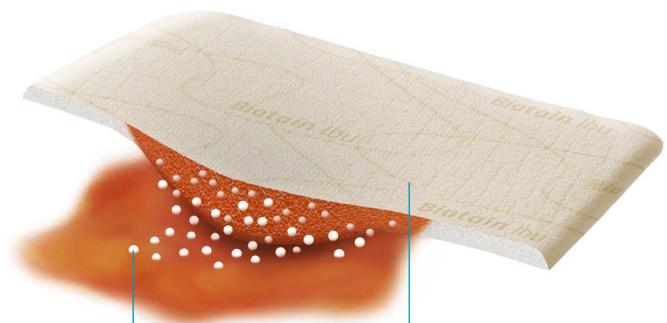

Ibuprofen
kontinuierliche Freisetzung

Biatain® Schaum
mit 3DFit Technologie



Kurzbeschreibung

Biatain[®] Ibu kombiniert den bewährten Biatain[®] Schaum mit einer lokalen und kontinuierlichen Freisetzung von Ibuprofen.

Durch die 3DFit Technologie wölbt sich der Schaum zum Wundgrund, absorbiert schnell Exsudat und speichert dieses sicher.

Pro cm² sind 0,5 mg Ibuprofen homogen im Schaum verteilt. In Abhängigkeit der Exsudatmenge wird das Ibuprofen lokal direkt am Wundgrund abgegeben und kann so durch Gewebeschädigungen bedingten Wundschmerz reduzieren.

Produktnutzen

- › Der Verband wölbt sich zum Wundgrund und absorbiert vertikal. So wird das Risiko von Mazeration und Leckagen minimiert
- › Exzellentes Absorptions- und Rückhaltevermögen auch unter Kompression
- › Schafft ein optimal feuchtes Wundheilungsmilieu
- › Lokale Freisetzung und Wirkung von Ibuprofen ohne systemische Belastung
- › Kann durch Gewebeschädigungen bedingte Wundschmerzen reduzieren
- › Schnelle und langanhaltende Wirkung auch während des Verbandwechsels (bis zu 7 Tage)
- › Erhöht die Lebensqualität des Patienten




Schmerzhafte Wunde im Bereich der Ferse.



Nach 2 Wochen: Wundgröße verringert, gesundes Granulationsgewebe, keine Mazeration.



Biatain[®] Ibu lässt sich auch an schwer zu versorgenden Körperstellen optimal anmodellieren.

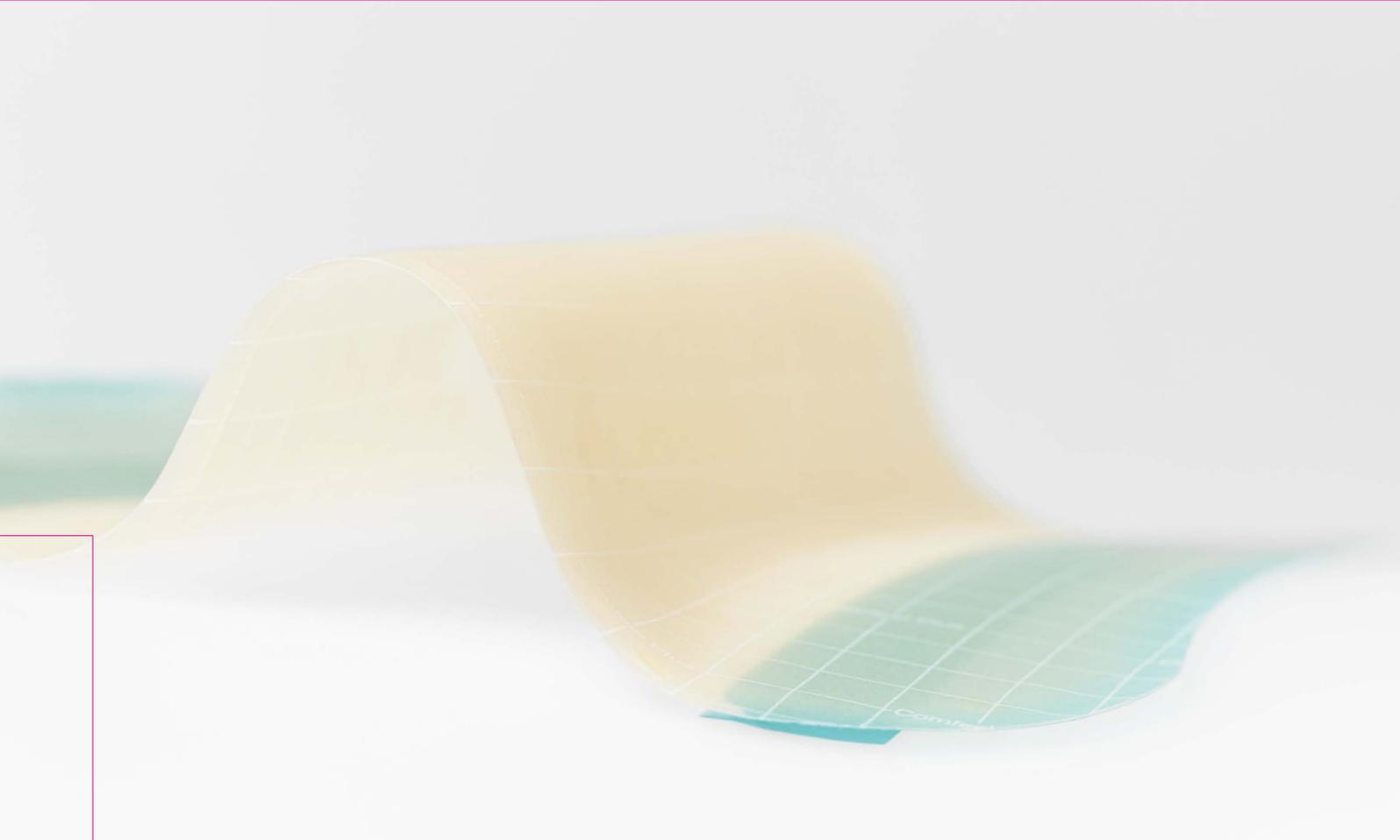

Comfeel® Plus Flexibel

Sicherer Schutz und optimale Wundheilung


Indikation

Comfeel® Plus Flexibel ist für die Behandlung von schwach bis mittelstark exsudierenden chronischen und akuten Wunden indiziert, insbesondere für:

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Brandwunden 1. und 2. Grades
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen

Vorteile

- › Besonders flexibel
- › Hautfreundlich
- › Enthält CMC und Alginat

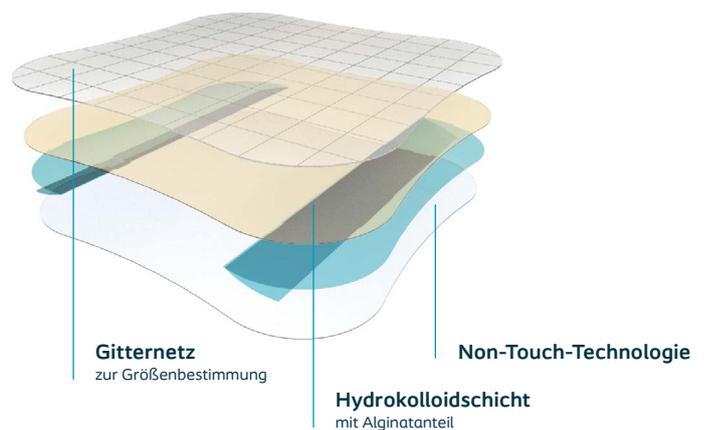



Kurzbeschreibung

Comfeel® Plus Flexibel ist ein besonders anpassungsfähiger und hautfreundlicher Hydrokolloidverband.

In der selbsthaftenden Hydrokolloidmatrix sind stark quellfähige Natrium-Carboxymethylcellulose (CMC)-Partikel und Calcium-alginat eingebettet, die für eine höhere Absorptionsfähigkeit sorgen.


Durch die semipermeable Polyurethanfolie passt sich die Verdunstungsrate der Menge des Exsudates an, wodurch unter dem Verband stets ein optimal feuchtes Wundmilieu besteht. Zusätzlich schützt die semipermeable Folie die Wunde vor Bakterien und Infektionen.

Produktnutzen

- › Die Oberfläche ermöglicht eine problemlose Grundpflege. Mobile Patienten können mit dem Verband duschen/baden
- › 3-teilige Non-Touch-Technologie für eine aseptische und einfache Applikation
- › Abgeflachte Kanten wirken einem Aufrollen des Verbands entgegen
- › Einfache Wundgrößenbestimmung durch Gitternetz
- › Sehr flexibel für eine einfache Anwendung und mehr Patientenkomfort
- › Erhöhte Exsudatmanagement-Eigenschaften schaffen ein optimal feuchtes Wundmilieu und erhöhen die Tragedauer




Sterile Applikation von Comfeel® Plus Flexibel.

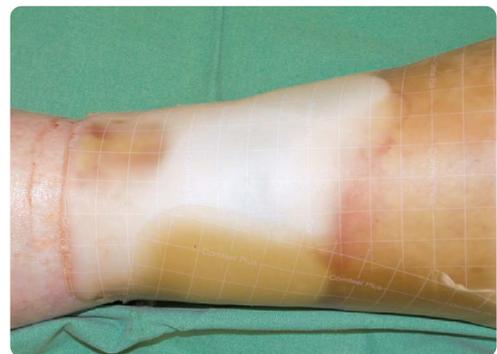

Sobald sich die gebildete Gelblase dem Verbandrand nähert, sollte der Verband gewechselt werden.



Ablösen des gelierten Verbands.

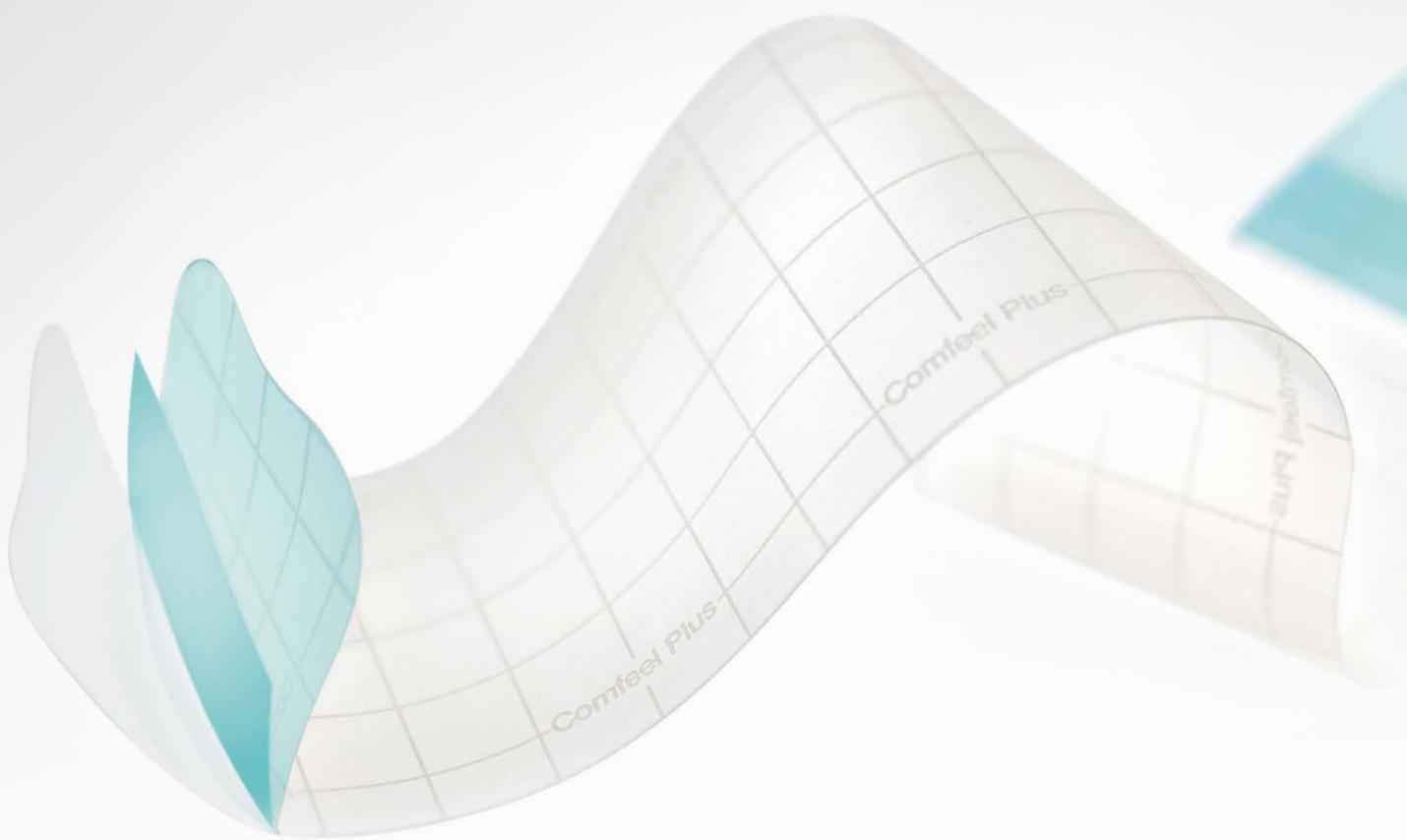

Comfeel® Plus Transparent

Für Schutz und Kontrolle


Indikation

Comfeel® Plus Transparent ist angezeigt bei akuten Wunden oder bei bereits epithelisierenden Wunden, wie z.B.

- › Postoperative Wunden
- › Spalthautentnahmestellen
- › Abschürfungen
- › Verbrennungen 1. und 2. Grades
- › Oberflächliche, chronische Wunden in der Epithelisierungsphase

Vorteile

- › Transparent
- › Hautfreundlich
- › Hoher Tragekomfort

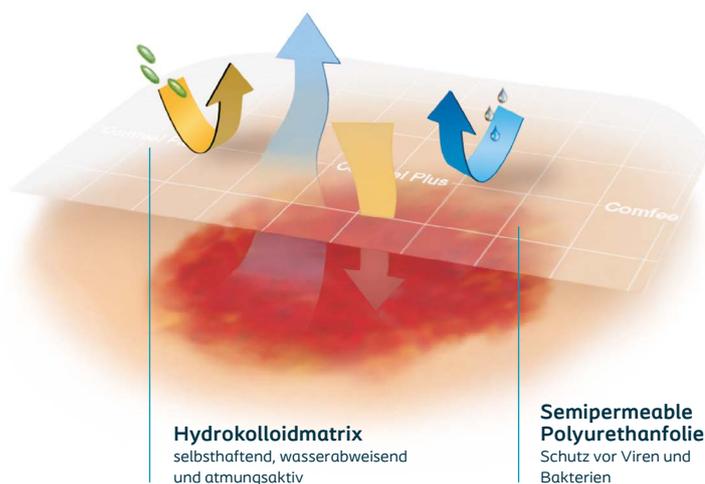

Hydrokolloidmatrix
selbsthaftend, wasserabweisend
und atmungsaktiv

**Semipermeable
Polyurethanfolie**
Schutz vor Viren und
Bakterien



Kurzbeschreibung

Comfeel® Plus Transparent ist ein besonders dünner, durchsichtiger Hydrokolloidverband.

In der stabilen, selbsthaftenden Hydrokolloidmatrix sind Carboxymethylcellulose (CMC)-Partikel eingebettet, die mit dem Wundexsudat ein kohäsives Gel bilden, welches die Wunde schützt und ein Verkleben mit dem neu gebildeten Epithel verhindert.

Die semipermeable Polyurethanfolie sorgt für ein stets optimal feuchtes Wundmilieu und schützt die Wunde vor Bakterien und Feuchtigkeit.



Flexibel und dünn zum Versorgen an schwierigen Körperstellen.

Produktnutzen

- › Die hohe Transparenz ermöglicht eine Wundinspektion ohne Verbandwechsel
- › Flexibel und dünn für hohen Tragekomfort und eine einfache Anwendung; auch an schwer zu versorgenden Körperregionen
- › Einfache Wundgrößenbestimmung durch Gitternetz
- › 3-teilige Non-Touch-Technologie für eine aseptische und einfache Applikation
- › Glatte Oberfläche sorgt für weniger Reibungs- und Scherkräfte
- › Passt sich wie eine zweite Haut an und reduziert so das Risiko von Spannungsblasen
- › Wasserabweisende Oberfläche ermöglicht problemlos die Grundpflege und ist duschfest



Einfaches und schnelles Bestimmen der Wundgröße dank Transparenz und Gitternetz.



Comfeel® Plus Transparent verklebt nicht mit dem Nahtmaterial.



Biatain[®] Superabsorber

Hohe Absorptionsfähigkeit für sehr stark exsudierende Wunden

Indikation

Biatain[®] Superabsorber ist für ein breites Spektrum an mäßig bis sehr stark exsudierenden chronischen und akuten Wunden bei Patienten ab 3,5 kg indiziert, wie z.B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Diabetisches Fußsyndrom
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen

Biatain[®] Superabsorber ist für alle Hauttypen geeignet, auch für brüchige und fragile Altershaut.

Vorteile

- › Kann mehr als das 15-fache seines Eigengewichts aufnehmen
- › Bindet Bakterien und Keime sowie MMPs
- › Sehr gutes Rückhaltevermögen
- › Unter Kompression einsetzbar

Topfilm

atmungsaktiv und wasserabweisend

Absorbierende Schicht

bindet Bakterien und Proteasen

Tuchgewebeschicht

Transferschicht

Wundkontaktschicht

sanft zur Haut





Kurzbeschreibung

Biatain® Superabsorber ist ein weicher, nicht-haftender Wundverband, der sehr große Mengen an Exsudat aufnehmen kann. Gleichzeitig schützt er die empfindlichen Wundränder und die wundumgebende Haut vor Mazeration. Er enthält superabsorbierende Partikel, die Exsudat einschließen und so ein optimales feuchtes Wundheilungsmilieu für eine schnellere Heilung schaffen.*

Bei infizierten Wunden kann Biatain® Superabsorber unter Aufsicht einer Fachkraft angewendet werden.

Biatain® Superabsorber reduziert die Aktivität der Proteasen MMP2 und MMP9 in der Wunde und trägt so zum Wundheilungsprozess bei.



Das Wundexsudat spielt eine wesentliche Rolle im Heilungsprozess.



Eine übermäßige Exsudatproduktion kann die Heilung verzögern und Komplikationen verursachen.¹

Produktnutzen

- › Effektives Absorptions- und Rückhaltevermögen auch unter Kompression
- › Bindet Bakterien und Keime sowie MMPs
- › Schützt den Wundrand und die wundumgebende Haut vor Mazeration
- › Einfach in der Anwendung** und entwickelt für eine rückstandslose Entfernung
- › Kann bis zu 7 Tage lang auf der Wunde verbleiben
- › Kann nach Ermessen des Arztes bei Patienten mit lokaler oder systemischer Infektion eingesetzt werden
- › Sanfter Kontakt für fragile Haut, keine Klebstoffe enthalten
- › Hoher Tragekomfort durch Weichheit
- › Als Primär- und Sekundärverband einsetzbar



Durch seine Weichheit ist Biatain® Superabsorber besonders leicht zu applizieren und sanft zur Haut.²

¹ World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Wound exudate: effective assessment and management Wounds International, 2019.

² Wounds UK Best Practice Statement. Effective exudate management. London: Wounds UK, 2013.

* Im Vergleich zur traditionellen/trockenen Wundheilung

** Coloplast Data-on-File 2023 basierend auf standardisierten Tests



Biatain[®] Super

Mehr als nur Absorption

Indikation

Biatain[®] Super Hydrokapillarverband für leicht bis sehr stark exsudierende Wunden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera


Verbände können während des gesamten Heilungsverlaufs eingesetzt werden. Zum Schutz von:

- › Brandwunden 2. Grades
- › Chirurgischen Wunden
- › Hautabschürfungen

Biatain[®] Super nicht-haftend eignet sich für alle Hauttypen, Biatain[®] Super selbst-haftend insbesondere für intakte Umgebungshaut.

Vorteile

- › Sehr saugstark mit Superabsorbent
- › Sehr gutes Rückhaltevermögen
- › Einfache Handhabung

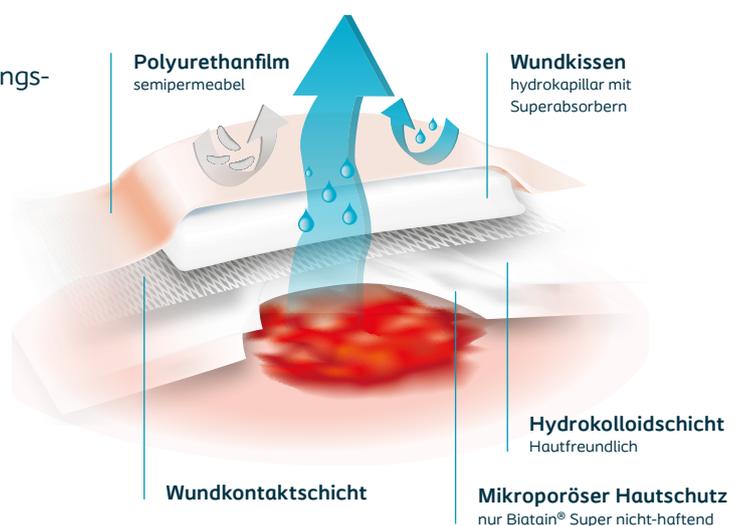



Kurzbeschreibung

Biatain® Super ist ein anschmiegsamer und flexibler Kompletterverband, der dank des integrierten Distanzgitters nicht mit dem Wundgrund verklebt. Schnelle Absorption sowie die Verteilung und Speicherung von Wundexsudat ermöglichen die volle Nutzung der Absorptionskapazität bei minimalem Risiko von Mazeration und Leckagen, selbst bei stark exsudierenden Wunden.

Biatain® Super selbst-haftend verfügt über einen hautfreundlichen Hydrokolloidhafrand, die nicht-haftende Variante über einen mikroporösen Hautschutz.

Produktnutzen

- › Gute Absorptionseigenschaften und gutes Rückhaltevermögen
- › Hohe Aufnahmekapazität
- › Schafft ein optimal feuchtes Wundmilieu
- › Das integrierte Distanzgitter schützt neu gebildetes Gewebe ohne mit der Wunde zu verkleben
- › Wirtschaftlicher Einsatz durch lange Tragedauer
- › Ermöglicht dem Patienten das Duschen*



Ausgangssituation: Dekubitus 2. Grades, Größe ca. 2 × 1 cm, Wundumgebung mazeriert.



Nach 2 Wochen: Wundgröße verringert, gesundes Granulationsgewebe, keine Mazeration.



Nach 4 Wochen: Dekubitus fast abgeheilt, Umgebungshaut gesund.

Biatain® Fiber

Mehr als nur ein Faserverband


Indikation

Biatain® Fiber ist ein gelbildender Faserverband für die Versorgung von mittel bis stark exsudierenden chronischen und akuten Wunden, einschließlich Wundhöhlen, wie z.B.

- › Diabetisches Fußsyndrom
- › Ulcus cruris (arteriell, venös und gemischte Ätiologie)
- › Dekubitus (Grad II bis IV)
- › Exsudatabsorption bei onkologischen Wunden
- › Traumatische Wunden
- › Verbrennungen 2. Grades
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden

Vorteile

- › Schließt Exsudat und Bakterien ein
- › Minimales Schrumpfen
- › Formstabiles Gel

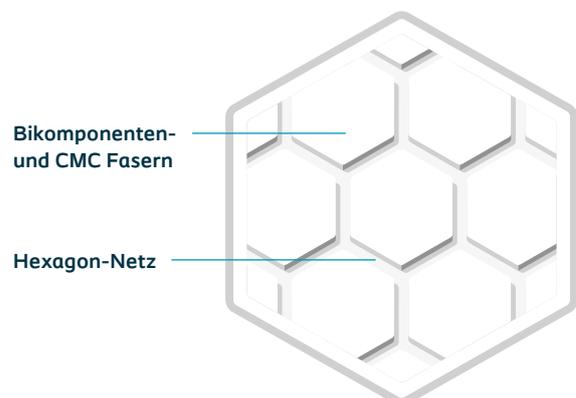



Kurzbeschreibung

Biatain[®] Fiber ist ein gelbildender Faserverband, der aus Natriumcarboxymethylcellulose (CMC) und Bikomponentenfasern besteht. Durch ein thermofixiertes Netz in stabiler Hexagon-Form wird der Verband zusätzlich verstärkt. Dies nennt sich HexaLock Technologie[®].

Bei Kontakt mit Wundexsudat absorbieren die CMC-Fasern im Verband das Exsudat und bilden ein formstabiles Gel. Der gelierte Verband hält das Exsudat zurück und passt sich dem Wundbett an, wodurch ein feuchtes Wundheilungsmilieu entsteht. Diese Umgebung unterstützt den Heilungsprozess der Wunde und erleichtert die Entfernung von avitalem Gewebe (autolytisches Debridement).




Biatain[®] Fiber schützt den Wundrand durch eine vertikale Absorption.

Produktnutzen

- › Hohe Absorptionsfähigkeit
- › Schließt Wundexsudat und Bakterien sicher ein
- › Schrumpft minimal und minimiert so das Risiko, dass sich Hohlräume und Exsudatansammlungen bilden
- › Einfache Entfernung in einem Stück durch formstabiles Gel
- › Minimales Risiko, Gel-Rückstände in der Wunde zu hinterlassen.
- › Absorbiert vertikal und schützt so den Wundrand vor Feuchtigkeitsschäden
- › Entfernt Beläge und unterstützt ein autolytisches Debridement



Lässt sich einfach in einem Stück entfernen.

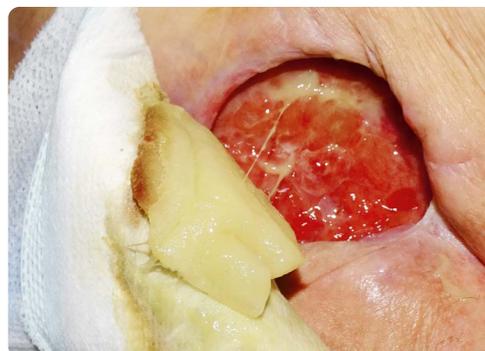

Versorgung mit Biatain[®] Fiber bei einer tiefen und unterminierten Wunde.



Biatain[®] Alginate

Für belegte Wunden und Wundhöhlen


Indikation

Biatain[®] Alginate ist vorwiegend anzuwenden zur Wundreinigung oder als Wundfüller bei mittelstark bis stark exsudierenden Wunden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Diabetisches Fußsyndrom
- › Dekubitalulcera
- › Verbrennungen 1. und 2. Grades

Vorteile

- › Reinigende Wirkung
- › In einem Stück entfernbar
- › Lokale Absorption

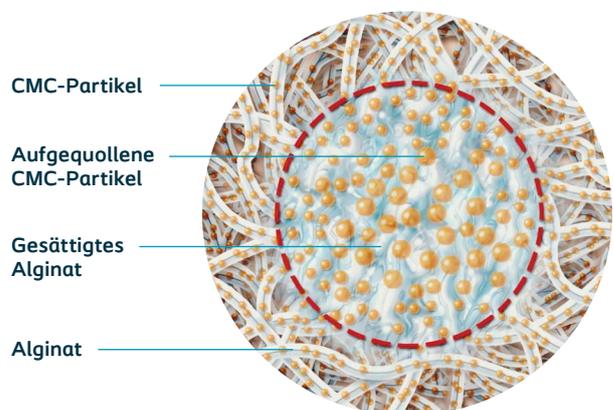



Kurzbeschreibung

Biatain® Alginate besteht zu 85% aus Calciumalginat und zu 15% aus hydrokolloiden Carboxymethylcellulose-Partikeln (CMC).

Die verwebte Materialstruktur bildet durch Ionenaustausch in Verbindung mit dem absorbierten Exsudat ein kohäsives Gel, das die Wunde feucht hält und Wundsekret sowie Gewebetrümmer aufnimmt und sicher einschließt.

Produktnutzen

- › Natürliche Reinigungsfunktion
- › Schnelle, lokale Absorptionsfähigkeit und gutes Rückhaltevermögen für reduziertes Mazerationsrisiko
- › Erhöhte Absorptionskapazität durch Materialkombination aus Calciumalginat und CMC-Partikeln sorgt für längere Tragezeit und weniger Verbandwechsel
- › Fördert die Wundheilung durch ein ideal feuchtes Wundmilieu
- › Weiche und gut applizierbare Materialkombination passt sich den Konturen der Wunde an
- › Einfach und atraumatisch in einem Stück entfernbar, ohne Rückstände in der Wunde
- › Blutstillender Effekt durch Calcium-Ionen



Postoperative, sekundär heilende Wunde.



Applikation von Biatain® Alginate in die Wunde.



Biatain® Alginate benötigt immer einen geeigneten Sekundärverband (z. B. Comfeel® Plus oder Biatain® Silicone).

Biatain® Alginate Ag

Für belegte, lokal infizierte Wunden und Wundhöhlen

Indikation

Der Biatain® Alginate Ag ist angezeigt bei mittelstark bis stark exsudierenden Wunden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitus
- › Diabetisches Fußsyndrom
- › Postoperative Wunden
- › Traumatische Wunden
- › Hautentnahmestellen
- › Wundhöhlen
- › Oberflächliche und mitteltiefe Verbrennungen

Biatain® Alginate Ag kann bei der Behandlung lokal infizierter Wunden oder Wunden, die einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind, unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden.


Vorteile

- › Natürliche Reinigung
- › In einem Stück entfernbar
- › Antimikrobielle Wirksamkeit

Lebendes Bakterium

Totes Bakterium

Silberion

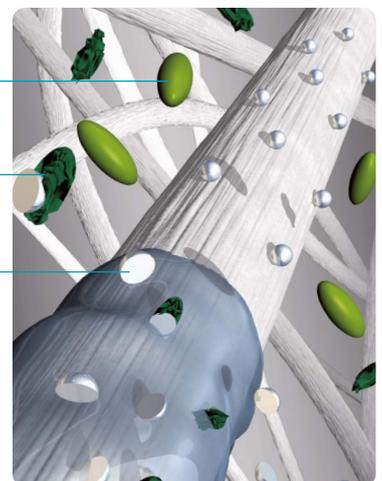



Kurzbeschreibung

Biatain® Alginate Ag ist eine hochsaugfähige, antimikrobielle Wundauflage aus Calciumalginat und Carboxymethylcellulose (CMC) und 0,5% ionischem Silber.

Bei Exsudataufnahme bildet sich ein kohäsives, strukturbeständiges Gel, das die Wunde feucht hält sowie Wundsekrete, abgetötete Bakterien und Gewebetrümmer sicher einschließt.


Zusätzlich werden in Abhängigkeit von der aufgenommenen Exsudatmenge Silberionen freigesetzt (Hydroaktivierung). Eine antimikrobielle Wirkung tritt im sich formenden Gel und am Wundgrund ein.

Produktnutzen

- › Schnelle, lokale Absorptionsfähigkeit und gutes Rückhaltevermögen für reduziertes Mazerationsrisiko
- › Materialkombination erhöht die Aufnahmekapazität und sorgt für längere Tragezeit und weniger Verbandwechsel
- › Fördert die Wundheilung durch ideal feuchtes Wundmilieu, natürliche Reinigungsfunktion und Reduktion der Keimbelastung
- › Weiche und gut applizierbare Materialkombination passt sich den Konturen der Wunde an
- › Breite antimikrobielle Wirksamkeit gegen die häufigsten Oberflächen- und Gewebekakterien in chronischen Wunden. Wirkt auch gegen Candida albicans, MRSA und VRE
- › Kohäsives, strukturbeständiges Gel ermöglicht einfaches und atraumatisches Entfernen in einem Stück




Applikation von Biatain® Alginate Ag zu Beginn der Behandlung.

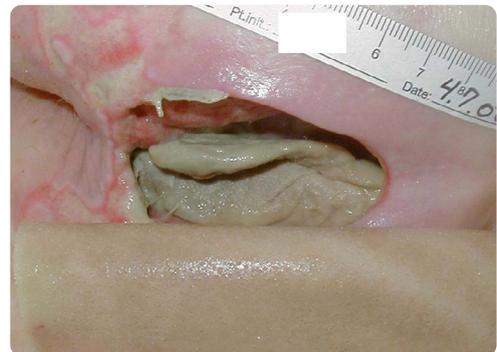

Beim nächsten Verbandwechsel ist Biatain® Alginate Ag komplett geliert.



Wunde nach Wundspülung am 18. Behandlungstag.

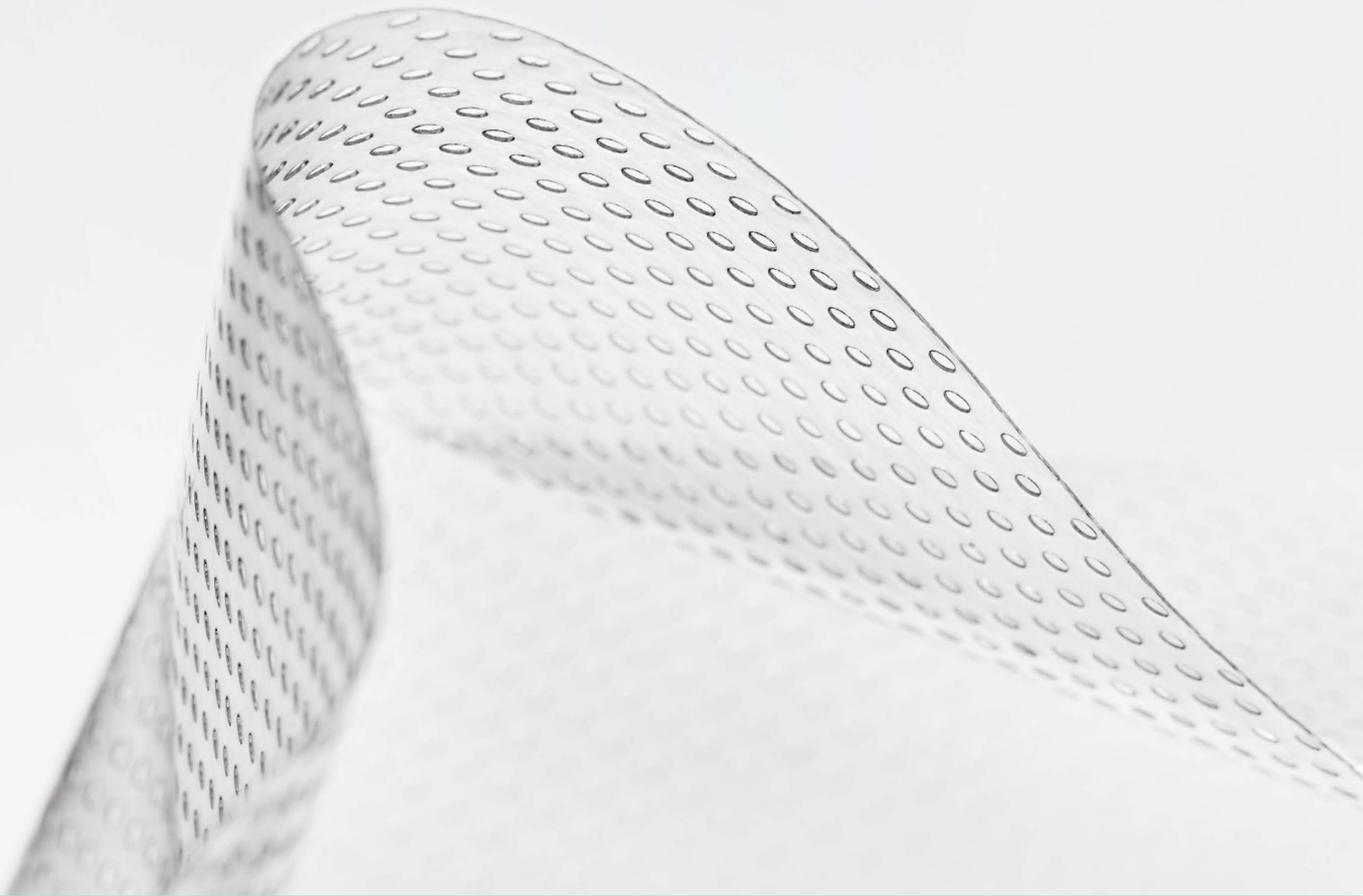

Biatain[®] Contact

Verbesserter Kontakt für eine ungestörte Wundheilung

Indikation

Biatain[®] Contact ist eine silikonbeschichtete Wundkontaktauflage, geeignet für die Behandlung chronischer und akuter Wunden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Diabetisches Fußsyndrom
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen
- › Verbrennungen 1. und 2. Grades

in Kombination mit einem Sekundärverband.


Ebenfalls kann es als Schutzschicht auf nicht exsudierenden Wunden und bei Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) eingesetzt werden.

Vorteile

- › Optimaler Exsudattransfer
- › Erleichterte Wundbeurteilung durch hohe Transparenz
- › Einfache Handhabung

Große Poren

Einseitige Haftung

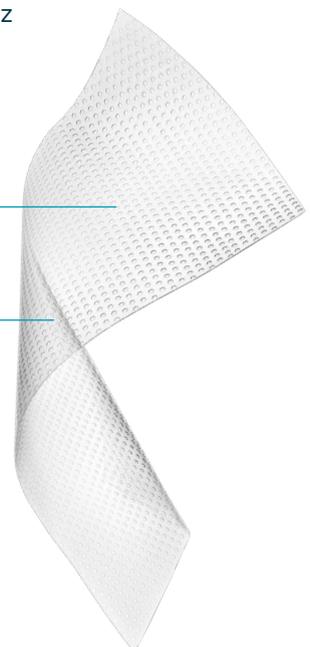



Kurzbeschreibung

Biatain® Contact ist eine Silikon-Wundkontaktauflage, die den Wundgrund und die Wundumgebung schützt und eine ungestörte Wundheilung fördert.

Sie besteht aus einem dünnen, flexiblen Polyurethanfilm, der einseitig mit Silikon beschichtet ist. Durch die einseitige Haftung wird die Handhabung, d. h. die Applikation und der Wechsel des Sekundärverbands erleichtert. Das Silikon wirkt einem Verkleben entgegen und sorgt für weniger Schmerzen beim Verbandwechsel.

Große Poren in dem Distanzgitter erlauben einen ungehinderten Abfluss von Exsudat in den Sekundärverband. Durch das transparente Material kann die Wunde ohne einen Verbandwechsel begutachtet werden.

Produktnutzen

- › Große Poren ermöglichen einen schnellen, optimalen Exsudattransfer in die Sekundärauflage
- › Kein seitliches Ausbreiten von Exsudat unter Biatain® Contact, was das Risiko von Mazerationen und Leckagen reduziert
- › Transparent für eine einfache Wundinspektion ohne Verbandwechsel
- › Einseitige Haftung für einfache Applikation und einfachen Wechsel des Sekundärverbands
- › Weniger Schmerzen und keine Schädigungen des Granulationsgewebes beim Verbandwechsel durch sanfte Silikonhaftung
- › Schützt den Wundgrund und die wundumgebende Haut und sorgt für eine ungestörte Wundheilung
- › Kein Einwachsen des Gewebes
- › Lange Tragedauer von bis zu 14 Tagen



Transparent für die Wundinspektion, ohne dass ein Verbandwechsel nötig ist.



Biatain® Contact schützt fragiles Granulationsgewebe.



Auch bei schmerzhaften, oberflächlichen Abschürfungen oder Läsionen kann Biatain® Contact zum Einsatz kommen.



InterDry®

Die effektive Versorgung von Hautfalten

Indikation

InterDry® ist für die Verwendung als Hautschutz zur Versorgung von Hautschäden in Hautfalten und/oder anderen Bereichen, in denen Haut auf Haut aufliegt, bestimmt.

Es ist indiziert für die Verwendung auf der Haut zwischen einander berührenden Hautflächen, wo es durch Perspiration und Reibung zu Entzündungen und/oder Reizungen kommt bzw. dies zu erwarten ist. Die Symptome werden auch als Intertrigo bezeichnet.

Vorteile

- › Transportiert Feuchtigkeit aus der Hautfalte heraus
- › Minimiert Reibung von Haut-auf-Haut
- › Bekämpft Pilze und Bakterien mit antimikrobiellem Silberkomplex

Feuchtigkeits-
transportierender
Textilstoff

Antimikrobieller
Silberkomplex



Kurzbeschreibung

InterDry® ist ein unsteriler weicher, feuchtigkeitstransportierender Textilstoff mit einem antimikrobiellen Silberkomplex, der auf alle drei Risikofaktoren abzielt, die mit der Schädigung der Hautfalte verbunden sind: Feuchtigkeit, Reibung und Bakterien sowie Pilze.

Der weiche Polyesterstoff leitet die Feuchtigkeit aus der Hautfalte heraus, wo sie dann verdunsten kann. Durch eine einzigartige, patentierte Technologie reduziert InterDry® die Reibung von Haut-auf-Haut.

Zudem enthält InterDry® einen antimikrobiellen Silberkomplex, der ein breites Spektrum an Pilzen und Bakterien, die üblicherweise in Hautfalten vorkommen, über die gesamte Tragedauer von bis zu 5 Tagen bekämpft.

Produktnutzen

- › Reduziert klinisch nachgewiesene Symptome der Intertrigo innerhalb von wenigen Tagen
- › Schnelle Reduzierung der Symptome steigert die Lebensqualität der Patienten und senkt gleichzeitig die Kosten der Behandlung.
- › Weiches, flexibles Material sorgt für hohen Tragekomfort
- › Einfache Handhabung und Anwendung
- › Zuschneidbar auf die benötigte Größe für die betroffene Hautfalte



InterDry® sollte mind. 5 cm aus der Hautfalte herausragen, so dass die Feuchtigkeit verdunsten kann.



Vor der Anwendung von InterDry®:
Erythem, Schmerzen, Juckreiz, Geruch



Nach der Anwendung von InterDry®:
Fast vollständige Abheilung nach 7 Tagen



Allrinse®

Mehr als die Lösung zur effektiven Wundreinigung

Indikation

Die Allrinse® Wundspüllösung reinigt und befeuchtet akute und chronische Wunden, wie z. B.

- › Schürf-, Riss- und Schnittwunden
- › Verbrennung 1 und 2. Grades
- › Ulcus cruris
- › Diabetisches Fußulcus
- › Dekubitus

Zum Lösen anhaftender Verbandstoffe oder Verkrustungen beim Verbandwechsel.

Allrinse® ist auch zur Anwendung im Bereich des Mundes und der Schleimhäute geeignet.

Vorteile

- › Effektive Wundreinigung
- › Fördert die Wundheilung
- › Reduziert das Infektionsrisiko

500 ml-Flasche

350 ml-Flasche

75 ml-Spray



Produktmerkmale

Haltbarkeit: 3 Jahre nach Herstellung

Einwirkzeit: 10–15 Minuten

Aufbruchfrist: 3 Monate nach Anbruch

Kurzbeschreibung

Allrinse® ist eine alkoholfreie Lösung zur effektiven Reinigung, Dekontamination und Befeuchtung von chronischen und akuten Wunden.

Eine Kombination verschiedener Oberflächen-aktiver Substanzen (Tenside) in effektiver Konzentration führt zu einer besonders effektiven Reinigungswirkung. PHMB im sauren Lösungsmilieu reduziert die Keimbelastung (z. B. MRSA). Der saure pH-Wert der Lösung stabilisiert mit einem Zink-Eisen-Komplex führt zur Überwindung der chronisch-stagnativen Heilungsphase und fördert die Heilung.

Produktnutzen

- › Schmerzfreie physikalische Wundreinigung von akuten und chronischen Wunden
- › Überwindung der stagnativen Heilungsphase durch die Optimierung des Wundmilieus
- › Effektive Dekontamination von belegten und kontaminierten Wunden (z. B. MRSA) sowie Vorbeugung von Infektionen
- › Zerstört Biofilm
- › Löst Verkrustungen und anhaftende Verbände
- › Lange nach Anbruch haltbar (3 Monate)
- › Einfach in der Anwendung
- › Fördert die Wundheilung
- › Kann in Verbindung mit handelsüblichen Produkten der Wundversorgung (z. B. Biatain® Silicone) angewendet werden



Effektive Reinigung von Belägen mit Allrinse®.



Vorher – Die Wunde ist belegt. Die Wundreinigung wird mit Allrinse® durchgeführt.



Nachher – Beläge in der Wunde konnten sichtbar entfernt werden.

Exsudatmenge



Purilon®

Zur sanften Auflösung von Nekrosen

Kurzbeschreibung

Purilon® Gel ist ein klares, amorphes Hydrogel mit Alginatzusatz. Der hohe Wasseranteil von 90 % bewirkt eine schnelle Rehydratisierung und Aufweichung trockenen Gewebes. Nekrosen und Beläge werden schonend abgetragen (autolytisches Débridement), ohne das neu gebildete Gewebe zu schädigen.

Indikation

Purilon® Hydrogel ist hauptsächlich bei nekrotischen, belegten und trockenen sekundärheilenden Wunden anzuwenden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Brandwunden 1. und 2. Grades

Produktnutzen


- › Kommt ohne Konservierungsstoffe aus und ist so noch schonender
- › Ermöglicht ein sanftes Débridement
- › Sehr hohe Gelstabilität erleichtert die Applikation und das Anlegen des Sekundärverbands
- › Gel verläuft nicht und schützt so die Wundränder vor Mazeration

Bei infizierten Wunden kann Purilon® Gel unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden. Purilon® Gel benötigt immer einen Sekundärverband (z. B. Comfeel® Plus Flexibel oder einen Biatain® Schaumverband)



Allzeit bereit. Mit Sicherheit.

Unsere **Wundsicherheitsbeauftragten** für ein ganzheitliches Wundmanagement

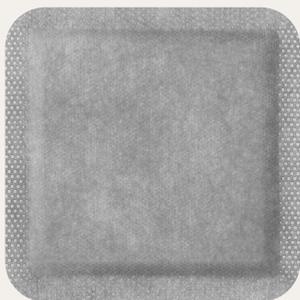

Biatain® Superabsorber



Biatain® Silicone



Biatain® Fiber



Allrinse®

Biatain® Silicone Non-Border, mit Silikonhaftung



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
16942307	39020	5 × 7,5	10	3902013
16942313	39021	7,5 × 7,5	10	3902113
16942336	39022	10 × 10	10	3902213
16942342	39023	12,5 × 12,5	10	3902313
16942359	39024	10 × 20	5	3902423
16942365	39025	15 × 15	5	3902523
16942371	39026	20 × 20	5	3902623

Biatain® Silicone Lite, mit Silikonhaftung



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
11485986	33452	5 × 5	2,2 × 2,2	5	3345203
11485992	33453	5 × 12,5	2,2 × 9,7	5	3345303
03880639	334443	7,5 × 7,5	4,5 × 4,5	10	3344433
03880697	334453	10 × 10	6,5 × 6,5	10	3344533
03880705	334463	12,5 × 12,5	8,5 × 8,5	10	3344633

Biatain® Silicone, mit Silikonhaftrand



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
03875348	334343	7,5 × 7,5	4,5 × 4,5	10	3343433
03879292	334353	10 × 10	6,5 × 6,5	10	3343533
11486000	33400	10 × 20	5,5 × 15,5	5	3340003
11486017	33401	10 × 30	5,5 × 25,5	5	3340103
11486075	33408	14 × 19,5 Multishape	7,5 × 12,1	5	3340803
03879702	334363	12,5 × 12,5	8,5 × 8,5	10	3343633
03879731	334373	15 × 15	10,5 × 10,5	5	3343733
03880585	334383	17,5 × 17,5	13 × 13	5	3343833

Biatain® Silicone, mit Silikonhaftrand, Sakrum/Ferse



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
11486023	33404	15 × 19 Sakrum	10,9 × 14	5	3340403
11486052	33405	25 × 25 Sakrum	17 × 17,2	5	3340503
11486069	33406	18 × 18 Ferse	14 × 13,2	5	3340603

Biatain® adhesive/selbst-haftend, mit Hydrokolloidhafrand



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
04636054	3462	7,5 × 7,5	Ø 4	10	3346203
01146898	3420	12,5 × 12,5	8 × 8	10	3342003
00568261	3423	18 × 18	13 × 13	5	3342303

Biatain® adhesive/selbst-haftend, mit Hydrokolloidhafrand, Sakrum/Ferse



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
01883355	3483	17 × 17 Sakrum	8 × 9	5	3348303
01360373	3485	23 × 23 Sakrum	10 × 11	5	3348503
01532006	3488	19 × 20 Ferse	6 × 6	5	3348803

Biatain® soft-hold/sanft-haftend



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
04474166	3470	10 × 10	5	347003
04474172	3472	10 × 20	5	347203

Biatain® non-adhesive/nicht-haftend



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
06156387	6105	5 × 7	10	3610503
00568232	3410	10 × 10	10	3341003
00953852	3412	10 × 20	5	3341203
00568249	3413	15 × 15	5	3341303
00975546	3416	20 × 20	5	3341603

Biatain® Cavity



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
04032014	3451	5 × 8	10	3345103

Biatain® Silicone Ag, mit Silikonhaftrand



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
03880711	396363	7,5 × 7,5	4,5 × 4,5	5	3963633
03880728	396373	10 × 10	6,5 × 6,5	5	3963733
13704518	39644	10 × 20	5,5 × 15,5	5	3964403
13704524	39645	10 × 30	5,5 × 25,5	5	3964503
03880734	396383	12,5 × 12,5	8,5 × 8,5	5	3963833
11033497	396393	15 × 15	10,5 × 10,5	5	396393
03880757	396403	17,5 × 17,5	13 × 13	5	396403

Biatain® Silicone Ag, mit Silikonhaftrand, Sakrum/Ferse



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
13704607	39650	15 × 19 Sakrum	10,9 × 14	5	3965003
13704547	39651	25 × 25 Sakrum	17 × 17,2	5	3965103
13704530	39652	18 × 18 Ferse	14 × 13,2	5	3965203

Biatain® Ag adhesive/selbst-haftend, mit Hydrokolloidhaftrand, Sakrum



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
06155933	9641	23 × 23 Sakrum	10 × 11	5	9641

Biatain® Ag non-adhesive/nicht-haftend



	PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
	06155666	5105	5 × 7	5	3510503
	06155028	9622	10 × 10	5	3962203
	06155034	9623	10 × 20	5	3962303
	06155353	9625	15 × 15	5	3962503
	06155399	9626	20 × 20	5	3962603

Schaumverbände mit Ibuprofen



Biatain® Ibu soft-hold/sanft-haftend



	PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
	04808532	4140	10 × 10	5	414003
	04808561	4142	10 × 20	5	4142

Biatain® Ibu non-adhesive/nicht-haftend



	PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
	04808331	4110	10 × 10	5	411003
	04808348	4112	10 × 20	5	411203
	04808354	4115	15 × 15	5	4115
	04808526	4120	20 × 20	5	4120

Comfeel® Plus Flexibel



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
12342349	33146	4 × 6	10	3314613
—	—	10 × 10	15	331103
12342355	33110	10 × 10	10	3311003
12342361	33115	15 × 15	5	3311503
12342378	33120	20 × 20	5	3312003

Comfeel® Plus Flexibel, Sakrum



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
12342384	33285	17 × 17	5	33285

Comfeel® Plus Contouriert



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
12342390	33280	6 × 8	5	3328003
12342409	33283	9 × 11	5	3328303

Comfeel® Plus Transparent



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
12342415	33530	5 × 7	10	3353003
12342421	335301	5 × 7	50	3353013
12342438	33533	10 × 10	10	3353303
12342444	33536	9 × 14	10	3353603
12342450	33539	15 × 15	5	3353903
12342467	33542	15 × 20	10	3354213
12342473	33547	5 × 15	10	3354703
12342496	33548	5 × 25	10	3354813
12342504	33537	9 × 25	5	3353703

Comfeel® Plus Druckentlastend



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
12342527	33353	10 (3–6) ^I	10	33353
12342533	33356	15 (5–9) ^{II}	10	33356

Superabsorber

Biatain® Superabsorber non-adhesive/nicht-haftend



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Wundkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
19376765	33600	7,5 × 7,5	5,5 × 5,5	10	3360003
19376771	33602	12 × 12	10 × 10	10	3360203
19376788	33604	12 × 22	10 × 20	10	3360403
19376794	33605	15 × 15	13,5 × 13,5	10	3360503
19376802	33607	20 × 25	18 × 23	10	3360703
19376819	33610	25 × 45	23 × 43	10	3361003

Biatain® Super adhesive/selbst-haftend, mit Hydrokolloidhafrand



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Wundkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
01402947	4610	10 × 10	5 × 5	10	461003
01403065	4612	12,5 × 12,5	7 × 7	10	461203
01403510	4625	12 × 20	6 × 14	10	462503
01403496	4615	15 × 15	8 × 8	10	461503
01403527	4620	20 × 20	11 × 11	10	462003

Biatain® Super non-adhesive/nicht-haftend



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Wundkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
01403533	4630	10 × 10	5 × 5	10	463003
01404277	4632	12,5 × 12,5	7 × 7	10	463203
01404981	4645	12 × 20	6 × 14	10	464503
01404975	4635	15 × 15	8 × 8	10	463503
01406342	4639	20 × 20	11 × 11	10	463903

Textilstoff zur Hautfaltenversorgung

InterDry®, mit Silberkomplex



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
15994354	67918	25 × 366 Rolle	1	67918
15994360	67919	25 × 91	10	67919

Alginateverbände ohne / mit Silber

Biatain® Alginate



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
01406388	37053	5 × 5	10	370533
01406365	3705	5 × 5	30	370523
01406394	3710	10 × 10	10	371023
01406419	3715	15 × 15	10	371523
01406425	3740	3 × 44 Tamponade	5	374033

Biatain® Alginate Ag



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
01406448	37551	5 × 5	10	375513
01406431	3755	5 × 5	30	375503
01406833	3760	10 × 10	10	376003
01406856	3765	15 × 15	10	376503
01406885	3780	3 × 44 Tamponade	10	378003

Wundkontaktauflage

Biatain® Contact, silikonbeschichtet



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
15628715	33560-0	5 × 7,5	10	33560-0
15628721	33560-2	5 × 7,5 Spenderbox	60	—
15628738	33561-0	7,5 × 10	10	33561-0
15628744	33561-2	7,5 × 10 Spenderbox	60	—
15628750	33562-0	10 × 18	10	33562-0
15628767	33563-0	15 × 25	5	33563-0
15628773	33564-0	18 × 30	5	33564-0

Wundspüllösung

Allrinse® Wundspüllösung



PZN	Handel Artikel-Nr.	Inhalt	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
17438195	4792	Spray à 75 ml	1	4792
17438189	4790	Flasche à 350 ml	1	4790
19454761	4797	Flasche à 500 ml Neu ab 01.01.25	1	4797

Gelbildender Faserverband

Biatain® Fiber



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
15628543	33502	5 × 6	10	33502
15628566	33504	10 × 12	10	33504
15628595	33506	15 × 15	5	33506
15628603	33507	19 × 25	5	33507
15628632	33508	2,5 × 46 Tamponade	10	33508

Hautschutz

Brava® Pflasterentferner, Spray und -Tücher



PZN	Handel Artikel-Nr.	Inhalt	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
09543699	12010	Flasche à 50 ml	1	12010
09543707	12011	Tücher	30	12011

Brava® Hautschutz, Spray und -Tücher



PZN	Handel Artikel-Nr.	Inhalt	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
09543736	12020	Flasche à 50 ml	1	12020
09543713	12021	Tücher	30	12021

Purilon® Gel



PZN	Handel Artikel-Nr.	Inhalt	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
00951356	3906	8 g	10	390603
08753555	3900	15 g	10	390003
08753549	3903	25 g	10	3903

Schutzcreme



PZN	Handel Artikel-Nr.	Inhalt	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
04803457	4720	Tube à 60 ml	6	4720
		HMV-Nr.	Tube: 29.26.10.0002	

Reinigungslotion



PZN	Handel Artikel-Nr.	Inhalt	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
08872018	4710	Flasche à 180 ml	6	4710
03435661	4715	Tücher	30	4715
		HMV-Nr.	Flasche: 29.26.10.3002 Tücher: 29.26.10.2001	

Die Erläuterung der Symbole

- leicht
- mittel – stark
- Zuschneidbar
- Sekundärverband notwendig
- leicht – mittel
- sehr stark
- Nicht-Zuschneidbar
- Fixierung notwendig
- leicht – stark
- Antimikrobiell
- Wasserfest
- Selbstzahler-Produkt*

Alle Verbandmittel der Coloplast GmbH sind derzeit als Einzelverordnung zu Lasten der GKV verordnungs- und erstattungsfähig. Bis zum Ende der Übergangsfrist, dem 2. Dezember 2025, gilt dies auch für unsere Produkte, die vermutlich als »Sonstige Produkte zur Wundversorgung« (silber- und ibuprofenhaltige Verbände, Hydrogele) einzustufen sind. Ein Antrag auf Weiterführung der Erstattung beim G-BA wird gestellt.

Lokale Therapie in der Wundversorgung

Exsudatmenge

sehr stark ●●●●

Produktempfehlung



Behandlungsziel

Exsudatmanagement
Optimal feuchtes Wundmilieu



Keimreduktion
Keimbindende und reduzierende Therapie, Wundspüllösung

Reinigung

Wundspüllösung Allrinse®



Zusätzlich bei stark belegten Wunden: **Biatain® Fiber**



+ Sekundärverband

Oberflächliche Wunden

Biatain® Superabsorber



Bei Bedarf zusätzliche Verbandwechsel mit Wundreinigung vornehmen. Kann nach Ermessen des Arztes auch bei lokaler oder systemischer Infektion eingesetzt werden.

Tiefere und komplexe Wunden

Biatain® Fiber



Biatain® Superabsorber



Exsudatmenge

mittel – stark ●●●○ – ●●●●

Produktempfehlung



Behandlungsziel

Exsudatmanagement
Optimal feuchtes Wundmilieu



Keimreduktion
Keimbindende und reduzierende Therapie, Wundspüllösung



Gewebeaufbau
Wundruhe

Reinigung

Wundspüllösung Allrinse®



Zusätzlich bei stark belegten Wunden: **Biatain® Fiber** oder **Biatain® Alginate****



+ Sekundärverband

Wundtiefe 0 – 2 cm

Biatain® Silicone oder **Biatain® Silicone Non-Border**



Biatain® nicht-/selbst-haftend



Biatain® Contact*

Schützt die Wunde und fördert eine ungestörte Wundheilung.



Wundtiefe > 2 cm

Biatain® Fiber oder **Biatain® Alginate****



Biatain® Silicone oder **Biatain® Silicone Non-Border** oder **Biatain® nicht-/selbst-haftend**



Exsudatmenge

leicht – mittel ●●●○ – ●●●●

Produktempfehlung



Behandlungsziel

Exsudatmanagement
Optimal feuchtes Wundmilieu



Epithelisierung
Wundruhe/
Gewebeschutz

Reinigung

Biatain® Fiber kombiniert mit **Allrinse®** Wundspüllösung




Oberflächliche Wunden

Biatain® Silicone Lite



Biatain® Contact*

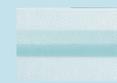

Comfeel® Plus oder **Comfeel® Plus Transparent**



Bei infizierten Wunden empfehlen wir Biatain® Silicone Ag, Biatain® Ag oder Biatain® Alginate Ag

*Sekundärverband in Abhängigkeit der Exsudatmenge erforderlich

**Tiefe Wunden mit Biatain® Alginate Verband locker füllen und darauf achten, dass der Verband nicht über den Wundrand hinausragt.



Für eine bessere Patientenversorgung

Weiterbildung für Pflegekräfte

Durch den kontinuierlichen Dialog mit Fachkräften und Patienten möchte Coloplast Wissen über Produkte, Behandlungen und Prozesse teilen und somit die Handlungskompetenz im Bereich der Wundversorgung ausbauen.

Coloplast® Professional ermöglicht Ihnen nicht nur die Teilnahme an zielgruppenspezifischen Präsenz- und Online-Seminaren, sondern fördert gleichzeitig einen intensiven Austausch unter Fachleuten verschiedener Arbeitsbereiche.

Auf unserer Website für Fachkräfte können Sie das aktuelle Programm ansehen und sich direkt dafür anmelden.

Fort- und Weiterbildung

Online lernen – unabhängig von Zeit und Ort – um sich damit exzellentes Fachwissen für den Arbeitsalltag anzueignen.

Das bietet das Coloplast E-Learning-Programm »Healthcare Excellence through Access and Learning«, kurz HEAL. Die Online-Plattform wurde gemeinsam mit Experten aus aller Welt entwickelt und bietet Lernmodule zur Wundversorgung.

HEAL



www.coloplastprofessional.de
› Wundversorgung › Fortbildung



Mehr auf info.coloplast.de/heal
› Wundversorgung › Fortbildung
› HEAL



Mehr Wissen für Sie

Klinische Expertise für Ärzte

Auf unserer Evidenz-Seite haben wir für Sie unabhängige wissenschaftliche Daten aufbereitet. Hier erwarten Sie neue wissenschaftliche Publikationen und Fallstudien zu verschiedenen Indikationen.

Unsere anschaulichen klinischen Videos komplettieren unser Angebot zum Thema Evidenz.

Wirtschaftlichkeit für die Praxis

Unter der Rubrik »Informationen für Ärzte« bieten wir Ihnen Informationen zur Kodierung und Abrechnung nach DGRs, zum EDM sowie zur Regressprophylaxe.

Außerdem finden Sie eine Übersicht zur Anerkennung von Coloplast Wundversorgungsprodukten beim Sprechstundenbedarf und weitere Informationen zu diesem Thema.



[info.coloplast.de/
evidenz-wundversorgung](https://info.coloplast.de/evidenz-wundversorgung)
› Wundversorgung › Evidenz



[info.coloplast.de/
informationen-aerzte](https://info.coloplast.de/informationen-aerzte)
› Wundversorgung
› Informationen für Ärzte

Coloplast entwickelt Produkte und Serviceleistungen, die das Leben von Menschen mit sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Fachkräften und Anwender:innen finden wir gemeinsam neue Wege für eine bessere Versorgung.

Wir vertreiben hochwertige Produkte für die Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung sowie für die Hautpflege, die Urologie und die Laryngektomie- und Tracheostomieversorgung. Darüber hinaus bieten wir in Deutschland auch Homecare-Dienstleistungen an.

Wir sind ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 16.500 Mitarbeiter:innen, Niederlassungen in 40 Ländern und helfen Menschen in mehr als 140 Ländern mit unseren Produkten.