



Haben Sie noch Fragen?

Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung unterstützt Sie bei der Anwendung des neuen Peristeen® Light 250 ml mit Verlängerungsschlauch.

Bitte lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung, die Ihrem Peristeen® Light System beiliegt, in Ruhe durch. Darin informieren wir Sie auch ausführlich über Krankheitsbilder und Symptome, die mit diesem Produkt versorgt werden können und klären Sie über Kontraindikationen und weitere Vorsichtsmaßnahmen auf.



Einfach QR-Code scannen:
Hier geht es zum Peristeen® Light
250 ml Anwendungsvideo.



Bitte vor der Nutzung des Produkts immer die beiliegende Gebrauchsanweisung lesen.

Schritt für Schritt erklärt: Das Peristeen® Light 250 ml mit Verlängerungsschlauch

Unser neuestes System für die transanale Irrigation (TAI)
mit geringer Wassermenge.



Das neue Peristeen® Light 250 ml mit Verlängerungsschlauch

Peristeen® Light ist ein leicht und diskret anzuwendendes Irrigationssystem mit geringer Wassermenge (250 ml). Es besteht aus einem wiederverwendbaren Wasserbehälter und Verlängerungsschlauch sowie einem Konuskatheter für die einmalige Nutzung.

1. Deckel

Lässt sich leicht öffnen und ragt über den Rand des Wasserbehälters hinaus, um Leckagen bestmöglich zu verhindern.

2. Rücklaufventil

Verhindert den Rückfluss von Ausscheidungen in den Wasserbehälter.

3. Katheter


Einmal-Konuskatheter mit abgerundeter Spitze und zwei Wasseröffnungen für möglichst sanftes Einführen. Die großzügige Katheter-Basis stellt sicher, dass der Wasserbehälter nicht mit Ausscheidungen in Berührung kommt.

4. Verlängerungsschlauch

Für mehr Flexibilität (Länge: 70 cm). Der Schlauch lässt sich beliebig – von jeder Seite – mit dem Wasserbehälter verbinden. Bitte nach jeder Anwendung mit Wasser und milder Seife spülen und nach 30 Anwendungen austauschen.

5. Wasserbehälter

Lässt sich in jeder Position leicht zusammendrücken und sicher in der Hand halten. Er fasst 250 ml Wasser und wird ohne Naturkautschuklatex hergestellt. Bitte nach 30 Anwendungen austauschen.

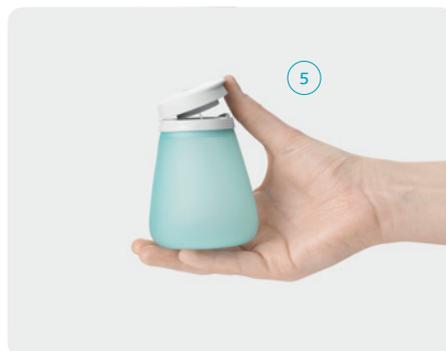

So verwenden Sie das Peristeen® Light 250 ml

Bevor Sie beginnen

Bitte entleeren Sie vor der Anwendung von Peristeen® Light 250 ml zunächst Ihre Blase.

Schritt 1

Wasserbehälter füllen

Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie den Behälter randvoll mit Leitungs- oder stillem Mineralwasser. Schließen Sie den Deckel. Das Wasser sollte körperwarm (34-40 Grad) sein. Ist es zu heiß, kann es die empfindliche Darmwand schädigen. Bei zu kaltem Wasser können Krämpfe auftreten.



Schritt 2

Katheter und Verlängerungsschlauch anschließen

Nehmen Sie den Konuskatheter aus der Verpackung und verbinden Sie ihn mit dem Verlängerungsschlauch. Danach befestigen Sie den Verlängerungsschlauch am Deckel. Sie können das Peristeen® Light 250 ml System auch ohne Verlängerungsschlauch nutzen. Verbinden Sie dafür den Konuskatheter direkt mit dem Wasserbehälter.



Schritt 3

Katheterbeschichtung aktivieren und Luft entfernen

Halten Sie den Katheter für mindestens 2 Sekunden unter fließendes Wasser, um die hydrophile Beschichtung zu aktivieren. Drücken Sie anschließend den Wasserbehälter langsam zusammen, bis Wasser aus der Katheterspitze austritt, um die Luft aus dem Katheter zu entfernen. Beginnen Sie nun innerhalb von 2 Minuten mit der Anwendung.



Hinweis: Verwenden Sie keine anderen Gleitmittel für den Katheter.

Schritt 4

Katheter einführen, Darm spülen und entleeren

Nehmen Sie den Wasserbehälter in eine Hand und führen Sie den Katheter vorsichtig in den Enddarm ein, bis die Basis des Katheters Ihren Körper berührt. Drücken Sie den Wasserbehälter langsam zusammen, um Wasser in den Enddarm zu geben und mit der Irrigation zu beginnen. Entfernen Sie anschließend den Katheter. Stuhl und Wasser werden in die Toilette ausgeschieden.



Schritt 5

Produkt auseinandernehmen

Um den Katheter vom Verlängerungsschlauch zu lösen, halten Sie ihn z.B. mit Toilettenpapier fest und ziehen Sie ihn vorsichtig vom Verlängerungsschlauch ab und entsorgen ihn im Hausmüll.



Schritt 6

Reinigen, trocknen und lagern

Entfernen Sie das Restwasser aus dem Wasserbehälter und dem Verlängerungsschlauch. Reinigen Sie die äußeren Flächen des Wasserbehälters und des Schlauchs mit Wasser und milder Seife. Wischen Sie beides anschließend z.B. mit einem Handtuch ab. Zum Trocknen den Schlauch aufhängen und den Deckel des Wasserbehälters offen lassen. Anschließend gründlich Hände waschen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



Bitte vor der Nutzung des Produkts immer die beiliegende Gebrauchsanweisung lesen.
<https://info.coloplast.de/ifus>