

InterDry®

Textilstoff mit einem antimikrobiellen Silberkomplex zur Verwendung beim Management von Hautfalten



Gebrauchsanweisung

23330901 Version 2

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S.

Alle Rechte vorbehalten. © 2023-09-27

Indikationen

Das Produkt ist für die Verwendung als Hautschutz zum Management von Hautschäden in Hautfalten und/oder anderen Bereichen, in denen Haut auf Haut aufliegt, bestimmt.

Das Produkt ist für die Verwendung auf der Haut zwischen einander berührenden Hautflächen, wo es durch Perspiration und Reibung zu Entzündungen und/oder Reizungen kommt bzw. dies zu erwarten ist, indiziert. Die Symptome werden auch als Intertrigo bezeichnet.

Intertrigo (intertriginöses Ekzem) ist eine mit Feuchtigkeit assoziierte Hautschädigung, die häufig in Körperbereichen wie der Achselhöhle, unter den Brüsten, am Abdomen, in der Leiste und zwischen den Fingern bzw. Zehen auftritt.

Kontraindikationen

Zum Einsatz des Produkts bei Kindern, während der Schwangerschaft und in der Stillzeit liegen keine Erkenntnisse vor. Die Verwendung des Produkts bei diesen Patientengruppen ist aufgrund fehlender Daten nicht vertretbar. Konsultieren Sie bitte eine medizinische Fachkraft für weitere Beratung.

Informationen

Das Produkt ist ein unsteriler Polyesterstoff, der die Reibung in der Hautfalte reduziert und Feuchtigkeit abtransportiert. Ein Silberkomplex im Stoff wirkt antimikrobiell gegen häufig in Hautfalten vorkommende Mikroorganismen. Die antimikrobielle Wirkung trägt darüber hinaus eventuell zur Geruchsminderung bei.

Wenn sich der Hautzustand nach 4-wöchiger Anwendung nicht bessert, sollte eine medizinische Fachkraft beurteilen, ob die Behandlung fortgesetzt werden sollte.

Falls Sie den Verdacht auf eine allergische Reaktion (Ausschlag, Jucken, Rötung oder Blasenbildung) oder sonstige Nebenwirkungen haben, wenden Sie sich bitte an eine medizinische Fachkraft.

Das Produkt kann während einer MRT-Untersuchung (Magnetresonanztomografie) an Ort und Stelle bleiben. Es ist kompatibel mit bis zu 3 Tesla.

Die Verwendung jeglicher Puder, Salben, Cremes oder Emollients zusammen mit dem Produkt kann seine vorgesehene Funktion verhindern.

Das Produkt bis zur Verwendung trocken und bei Raumtemperatur in der Originalverpackung aufbewahren.

Coloplast übernimmt keine Haftung für jegliche Verletzungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.

Wichtiger Hinweis

Das Produkt darf nicht direkt auf Wunden aufgebracht werden.

Das Produkt darf bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Silber nicht verwendet werden.

Im Falle einer Infektion stellt die Verwendung des Produkts keinen Ersatz für eine adäquate Infektionsbehandlung gemäß den institutionellen Richtlinien dar.

Das Produkt muss vor Strahlenbehandlungen oder Untersuchungen mit Röntgenstrahlen, Ultraschall, Diathermie oder Mikrowellen entfernt werden.

Das Produkt nicht waschen.

Das Produkt nicht unter der Dusche oder beim Baden tragen.


Anwendungshinweise

Vorbereiten



Die Haut vorsichtig reinigen und trockentupfen, ohne zu reiben.

Anwendung

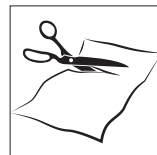

Messen und mit einer sauberen Schere ein Stück Stoff in geeigneter Größe abschneiden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass mindestens 5 cm Stoff außerhalb der Hautfalte überstehen sollte, damit Feuchtigkeit verdunsten kann.

Stoff in einer einzelnen Lage in die Hautfalte legen und darauf achten, dass der Stoffrand am Grund der Hautfalte anliegt.

Den Stoff vorsichtig auf der Haut glattstreichen, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.

Mindestens 5 cm Stoff sollte außerhalb der Hautfalte überstehen.

Den Stoff mit der Hautfalte fixieren oder unter ein Kleidungsstück stecken.



Jedes Stoffstück kann je nach Verschmutzung, Geruch, Feuchtigkeitsmenge und allgemeinem Hautzustand bis zu 5 Tage lang benutzt werden. Falls der Stoff jedoch innerhalb der 5 Tage abgenommen wird, z. B. zum Duschen oder Baden, sollte er nicht wieder angelegt und stattdessen ein neues Stoffstück verwendet werden.

Entfernen

Den Stoff aus der Hautfalte entfernen, indem diese offengehalten und der Stoff vorsichtig abgehoben wird.

Entsorgung

Das Produkt sollte gemäß der gültigen Richtlinien z. B. zusammen mit dem normalen Hausmüll, entsorgt werden.